

# Gynekologi, urologi og proktologi

Det perfekte utstyret som  
tilfredstiller alle behov

## Gynekologiske undersøkelses- og behandlingsstoler



Når kvalitet teller



CE

[November 2022, kat75]

# svas svalland as



# Innholdsfortegnelse

<b>medi-matic</b>	<b>9</b>
medi-matic Modelloversikt	11
medi-matic Standard utstyr	13
medi-matic Justeringsfunksjoner og dimensjoner	15
medi-matic Benstøttesystemer	20
medi-matic Tilbehør for alle disipliner	22
medi-matic LED undersøkelseslampe	26
medi-matic Tilbehør for gynækologi	30
medi-matic for urologi	35
medi-matic Ekstra tilbehør for urologi, urodynamikk	36
<b>vidan2</b>	<b>45</b>
vidan2 – Modelloversikt	57
vidan2 Tekniske data	59
<b>vidan2 mobil</b>	<b>61</b>
vidan2 mobil – Modelloversikt	65
vidan2 mobil Tekniske data	67
<b>arco-matic</b>	<b>71</b>
arco-matic Modelloversikt	75
arco-matic Standard utstyr	77
arco-matic Justeringsfunksjoner og dimensjoner	79
arco-matic Benstøttesystemer	81
arco-matic Tilbehør	84
<b>arco kombinert med Orbit</b>	<b>91</b>
arco Modelloversikt	97
arco Standard utstyr	99
arco Justeringsfunksjoner og dimensjoner	101
arco Benstøttesystemer	103
arco Benstøttesystemer	105
arco Tilbehør	106
arco Tilbehør	108
<b>arco proktologi</b>	<b>111</b>
arco proktologi Standard utstyr	115
arco proktologi Justeringsfunksjoner og dimensjoner	117
arco proctology Modelloversikt	119
arco proctology Benstøttesystemer	120
<b>Orbit</b>	<b>123</b>
Orbit Dispenser- og avfallsmoduler, mobil	128
Orbit Tilbehør til Dispenser- og avfallsmoduler	133
Orbit Modell- og materialbeskrivelse	141
Orbit Modell- og materialbeskrivelse	142
Orbit – Eksempler på løsninger	146
<b>Fargekart</b>	<b>148</b>
<b>Kontaktinformasjon</b>	<b>Se bakside</b>



Made in Germany





## Lange tradisjoner

Med mer enn 90 års erfaring er SCHMITZ en av de ledende internasjonale produsentene av medisinsk utstyr.

En familieeid bedrift med en levende tradisjon. Vår typiske medarbeider har vært i selskapet i rundt 18 år, et bevis på hvor sterkt de identifiserer seg med våre verdier og filosofi.

I 2012 gikk selskapets ledelse over til Friedrich og Matthias SCHMITZ, den fjerde generasjonen av familien.

Vi er stolte av å være lokalisert i Tyskland og er dypt forankret i vår hjemregion. Vi utvikler og produserer her. 90 % av våre leverandører er fra Tyskland, hvorav 60 % er fra den lokale regionen.

## Maksimal kundetilfredshet

Vår livsnerve er at vi har en inngående kjennskap til våre kunders behov, og har som mål å oppnå maksimal kundetilfredshet. Fra rådgivning via planlegging til installasjon.

Kostnadseffektive produkter med lang levetid er det du kan forvente av oss.

Med et gjennomtenkt servicekonsept og omfattende support jobber vi sammen med deg som partner fra start til slutt.

---

*“Lidenskap for kvalitet og urokkelig dedikasjon til detaljer – ekspert på alle områder”*



Design: Rainer Schindhelm

## medi-matic

Banebrytende teknologi og fascinerende design

Kombinasjonen av optimal funksjonalitet, førsteklasses komfort og elegant design gjør medi-matic til den beste i sin klasse. Utviklet for å sette nye standarder i daglig medisinsk praksis og klinisk bruk.

### **Sofistikert design**

Takket være materialer av høy kvalitet og dens attraktive design, garanterer medi-matic en profesjonell, tillitsvekkende atmosfære.

### **Ergonomi og effektivt arbeid**

Utstyrt med opptil fire motorer, muliggjør medi-matic optimale undersøkelsesposisjoner for å hjelpe deg med å arbeide ergonomisk.

### **Praktisk og trygg**

Den lave starthøyden på 550 mm gjør den perfekt for å komme seg komfortabelt og enkelt inn og ut av stolen uten ekstra oppsteg.

Benposisjonssystemene kan enkelt løsnes – ideelt for rullestolbrukere og bevegelseshemmede pasienter.



## **medi-matic**

Intelligent kontroll, kontrolelementene

### **Opplyst visuelt display**

Hold øye med alt! Det opplyste visuelle displayet viser alle stolens bevegelser og har også en elektronisk diagnosefunksjon.

### **Ekstra programmerbare taster**

For setevarme (gynekologi) eller vanninntak for Pussbolle med gyrospyling vannskylling (urologi) og for en lyskilde eller et kolposkop med integrerte stikkontakter.

### **Minnefunksjon og samtidig oppstart**

Mer tid til pasientene dine, mindre tid brukt på å finne den optimale innstillingen på behandlingsstolen – resultatet av flere tiår med utvikling og erfaring. Med opptil åtte minneposisjoner kan flere leger når som helst lagre og få tilgang til sine foretrukne undersøkelsesposisjoner.


### **Myk oppstart og ergonomisk bevegelse**

Alle motorene til medi-matic har en myk oppstart og ergonomisk bevegelsessekvens. Sikkerhet for pasienten til enhver tid!

### **Fot- eller håndkontroll**

Stolen kan betjes med både håndkontroll og fotkontrollpanel.

### **Modellavhengig utstyr!**

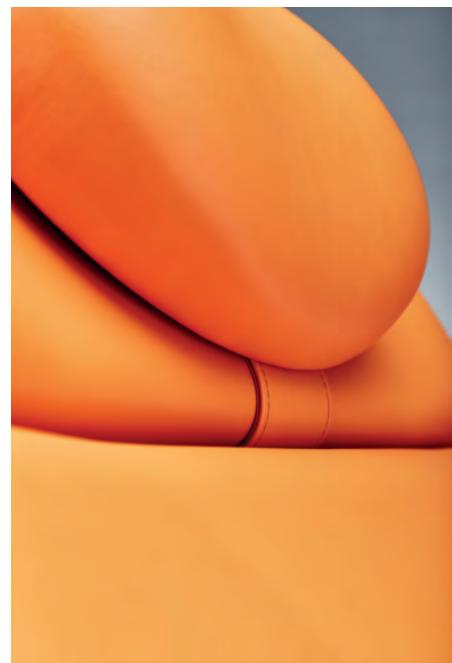

## **medi-matic** Modelloversikt

Modell nr.	Beskrivelse
	<b>115.7150.1 medi-matic undersøkelses- og behandlingsstol</b> Elektromotorisk justering av Trendelenburg posisjon og ryggseksjon, og i tillegg elektromotorisk høydejustering fra 600 mm til 900 mm, innstigningshøyde: 550 mm. Alle funksjoner kan aktiveres av ved hjelp av fotkontroll.
	<b>115.7250.1 medi-matic undersøkelses- og behandlingsstol</b> Som 115.7150.1, men i tillegg med minnefunksjon for lagring av 8 posisjoner. Aktivering av alle funksjoner ved hjelp av hånd- og fotkontroll.
	<b>115.7550.1 medi-matic undersøkelses- og behandlingsstol</b> som 115.7250.1, men i tillegg elektromotorisk justering av fotstøtter. (uten fotstøtter/vennligst vurder tilsvarende modell nr. 101.4420.1 eller Göpeltype benstøtter 101.4550.0) Aktivering av alle funksjoner ved hjelp av hånd- og fotkontroll.

**Merk:** Alle basismodeller leveres uten benposisjonerings-system, velg bland fem alternativer: side 20/21. Valgfri mobilitet med hjul: side 25.

Oppdag vår nye produkt og fargekonfigurator





Pusskuff i plast, uttrekkbar



Oppbevaringsrom for papirruller.  
Passer til papirrull: bredde 400 mm, Ø ca. 140 mm eller 500 mm papirrullbredde, Ø ca. 120 mm.



Avtakbar setepolstring for enkel rengjøring og utskifting.



Brakett for håndkontroll laget av 18/10 rustfritt stål, kan monteres på venstre eller høyre side etter behov, snap-in funksjon (115.7250.1 og 115.7550.1).



Fotkontroll for 115.7250.1 og 115.7550.1.



Fotkontroll for 115.7250.1 og 115.7550.1 med pussbolle med gyrospyling.  
Vannkrane styres av en ekstra funksjonstast.

## **medi-matic** **Standard utstyr**

Sete-, rygg- og hodeseksjoner med ergonomisk polstring, pusskuff av plast, uttrekkbar, oppbevaring for papirruller opp til 500 mm bredde, aktivering av justerings- og minnefunksjoner via hånd- og fotkontroll (modellavhengig utstyr). Bunnsockel med 4 nivelleringskruer, plastkledninger og deksler i sølvgrå, teleskopkledning av bæresøyle og sete/ryggseksjonsramme pulverlakkert iht. til fargekart, polstringer iht. til fargekart. Fotstøttefester for rask fjerning og individuelt horisontalt svingbare fotstøtter eller Göpel-type benstøtter med integrerte håndtak (ikke tilgjengelig for utstyr med sideskinne 101.1370.0). Strømkabel på 3 m med støpsel (på forespørsel, klargjort for fast tilkobling til vegg/jord, uten tilkoblingskabel).

Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, maks. 0,45 kW. Sikker arbeidsbelastning: 200 kg.

### **Viktig**

Undersøkelsesstoler med sideskinne 101.1380.0 ved ryggseksjon er utstyrt med støtepolarstring som går i flukt med ryggseksjonsrammen, se side 42.

### **Elektriske stikkontakter**

Stolen kan utstyres med 2 stikkontakter iht. til sikkerhetsstandarden EN 60601-1! Se side 27. Ettermontering ikke mulig.

### **Pulverlakkert finish**

Høykvalitets flerlags glanslakk med ekstrem motstand mot slag og riper. Enkel å rengjøre og desinfisere. Motstandsdyktig mot klimatiske forhold.

Tilgjengelig i SCHMITZ-farger iht. til fargekart, side 152 (uten tillegg). Andre farger i henhold til RAL fargekart kan bestilles mot et pristillegg.

### **Polstringer**

Høykvalitets, slitesterk skumgummi kledd i kunstlær. Tilgjengelig i SCHMITZ-farger iht. til fargekart uten tilleggspris (klassisk og komfort kvalitet).

### **Følgende informasjon er nødvendig ved bestilling:**

Fot-/benstøttesystem: se side 20/21







Polstringsfarge: se fargekart side 148

Farge på pulverlakkerte materialer: se fargekart side 148

Modell nr. Beskrivelse

**100.0510.0 Valgfrie farger:**

Ytterligere valgfrie farger iht. til RAL fargekart mot pristillegg.

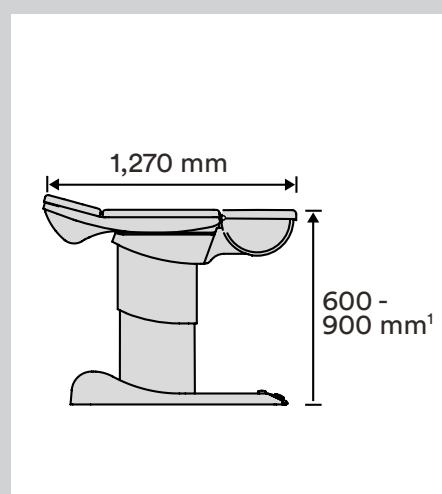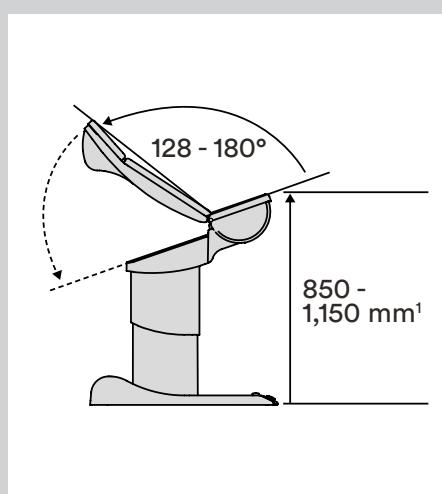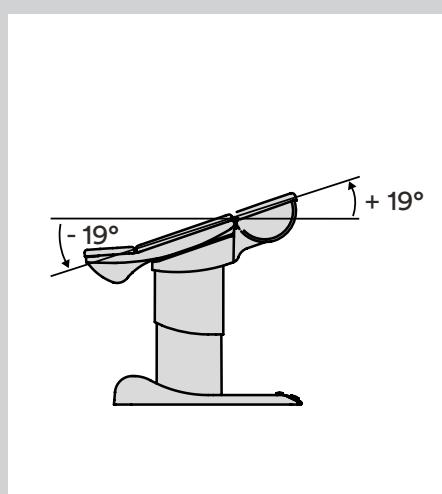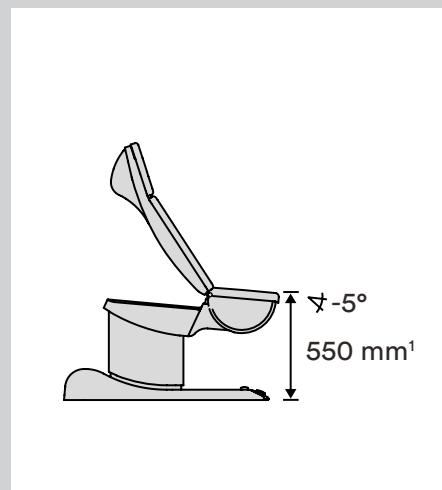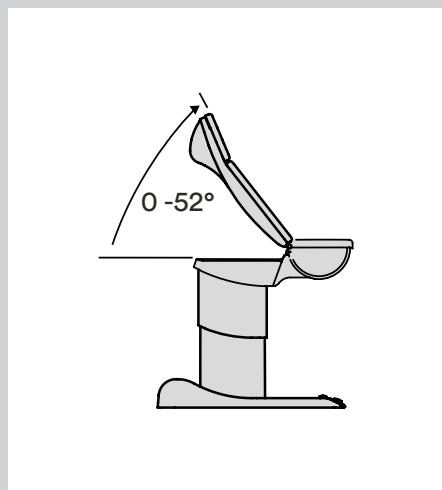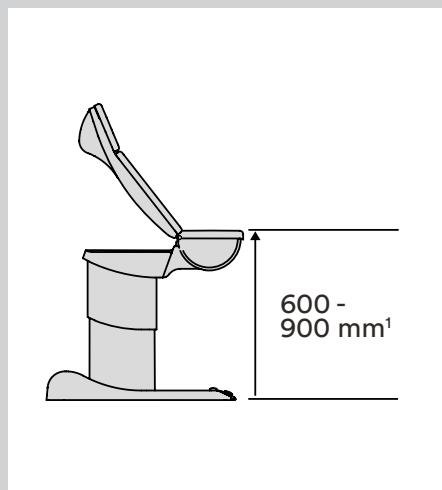

For mobile modeller med hjul 101.2300.0,  
vennligst legg til 75 mm på høyden.

Design og dimensjoner kan endres.

## medи-matic Justeringsfunksjoner og dimensjoner

Dimensjoner	115.7150.1	115.7250.1	115.7550.1
Sokkel	1050 × 575 mm	1050 × 575 mm	1050 × 575 mm
Bredde på polstringer	Ryggsessjon 560 - 680 mm, Setesessjon 585 mm	Ryggsessjon 560 - 680 mm, Setesessjon 585 mm	Ryggsessjon 560 - 680 mm, Setesessjon 585 mm
Total bredde	690 mm	690 mm	690 mm
Ryggsessjonen, elektro-motorisk regulerbar	■	■	■
Trendelenburg stilling, elektr. regulerbar	■	■	■
Høyde, elektr. regulerbar	■	■	■
Minnefunksjon		■	■
Skyllebolle	■	■	■
Sideskinne, setesessjon	●	●	
Fotstøtter, elektromotorisk regulerbar			■
Netto vekt (u/ tilbehør)	156 kg	156 kg	165 kg
Sikker arbeidsbelastning	200 kg	200 kg	200 kg

■ = standard utstyr, ● = tilleggspris



Trendelenburg posisjon



Justering av ryggryggseksjon



Høydejustering



Elektromotorisk fotstøttejustering  
(115.7550.1)





*Lav innstigningshøyde lar pasientene ta plass uten anstrengelse*



*Horisontal posisjonering for ultralydundersøkelse*



*Posisjonering med benstøtter av Göpel-typen festet til sideskinner  
(bilde med medi-matic undersøkelsesstol)*



*Posisjonering med Ergo-Steps festet til sideskinner  
(bilde med medi-matic undersøkelsesstol)*



*Posisjonering med UniLeg benstøtter  
(bilde med arco-matic undersøkelsesstol)*



*Posisjonering med UniLeg benstøtter  
(bilde med arco-matic undersøkelsesstol)*

## **medi-matic** Benstøttesystemer



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.4420.1</b>	<b>Fotstøtter (par)</b> med integrerte, pulverlakkerte håndtak, kan svinges til siden, låsbar. Overtrekk i kunstlær på håndtak i henhold til fargekart. Vi anbefaler 101.4820.0 av gjennomsiktig PU-materiale som beskyttelse til fotstøtten.



<b>101.4550.0</b>	<b>Benstøtter, Göpel (par)</b> med integrerte, pulverlakkerte håndtak. Overtrekk i kunstlær på håndtak i henhold til fargekart. Benstøtter med skumstøpt polstring i sølvgrå, med festestropp, festestang i rustfritt stål 18/10.
-------------------	--



<b>101.0369.0</b>	<b>UniLeg benstøtter med peroneal nervebeskyttelse E, (par)</b> høydejusterbare og spredbare fra fotenden, med gassfjærstøtte, plastbelegg med polstring for fot og legger, justerbar i alle posisjoner, med integrert sideskinnefeste.
-------------------	--



<b>101.0678.0</b>	<b>UniLeg benstøtter (par) E, (par)</b> Samme som modell 101.0369.0, men uten peroneal nervebeskyttelse.
-------------------	---



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.2270.0</b>	<b>benholder, type Göpel, (stk.)</b> med skumstøpt polstring i sølvgrå farge, med festestropp. Festestang i rustfritt stål. Både 101.1370.0 sideskinne og 101.1670.0 festeklamme må tilleggsbestilles.
<b>101.1370.0</b>	<b>Sideskinne (par)</b> for seteseksjon, rustfritt 18/10-stål, 25 × 10 mm, 290 mm lang.
<b>101.1670.0</b>	<b>Festeklemme (stk.)</b> roterende, rustfritt stål 18/10, for montering på sideskinne.
<b>101.1580.0</b>	<b>Håndtak (stk.)</b> med skumstøpt polstring i sølvgrå farge, for montering på sideskinne 101.1370.0. (kun i kombinasjon med Göpel benstøtter 101.2270.0)
<b>101.2310.0</b>	<b>Ergo Steps (par)</b> benstøttesystem med justerbar hæl-/legg, grå plast, kan svines til siden, integrerte håndtak i samme farge som stolen. Festeelementer i rustfritt 18/10-stål, for montering på sideskinne (nødvendig tilleggsbestilling 101.1370.0).



## **medi-matic** Tilbehør for alle disipliner



Modell nr. Beskrivelse

---

**101.4450.0 Benplate**

uttrekkbar, integrert i seteseksjonsrammen, med integrert skumpolstring, grå (L 340 x B 470 x H 20 mm). Sikker arbeidsbelastning: 50 kg.  
(ettermontering mulig, vennligst kontakt vår serviceavdeling.)



---

**101.4460.0 Mellomstykke**

mellomliggende polstring av integralskum, grå, for uttrekkbar benplate 101.4450.0. (ettermontering mulig)



---

**101.4470.0 Benplate**

innstikksplate, (L 620 x B 550 x H 45 mm), polstring med kunstlær iht. til fargekart. Sikker arbeidsbelastning: 50 kg.  
(ettermontering mulig, vennligst kontakt vår serviceavdeling.)



---

**101.3720.0 Hodepute**

polstring med kunstlær i henhold til fargekart.



---

**101.4810.1 Plastbeskytter**

for beskyttelse av setepolstring, transparent høykvalitets PU-plast, festes med borrelås på baksiden.



Modell nr. Beskrivelse

- 
- 100.1760.0 Papirrull**  
400 mm bred, integrert i stolrygg



- 101.6540.0 Brett med støttearm**

i rustfritt stål, kan roteres og svinges i horisontalplanet, for instrumenter og annet utstyr. Utnyttbar plass: 309 x 285 mm, sikker arbeidsbelastning 10 kg.



- 
- 101.4900.0 Stikkontakt for 115.7150.1**

2 stk. stikkontakter i henhold til EN 60601-1.  
(ettermontering ikke mulig)



- 
- 101.6800.0 Stikkontakt for 115.7250.1 og 115.7550.1**

2 stk. stikkontakter i henhold til EN 60601-1, aktivering av 1 stikkontakt med håndkontrollenhet.  
(ettermontering ikke mulig)

## **medi-matic** Tilbehør for alle disipliner



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.4750.0</b>	<b>Fotstøtte for legen</b> rustfritt stål (ikke mulig i kombinasjon med gyrospyling 101.4940.0/101.4990.0)
<b>101.4520.1</b>	<b>Oppsteg</b> festet til stol, bevegelig, slitebane av plastmateriale, farge sølvgrå. (ikke mulig i kombinasjon med hjul for mobilitet 101.2300.0 eller gyrospyling 101.4940.0/101.4990.0)





Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.4800.1</b>	<b>Plastdeksler (par)</b> av gjennomsiktig materiale, for beskyttelse av fotstøtter.
<b>101.2300.0</b>	<b>Mobilitet</b> 4 tvillinghjul, Ø 75 mm, låsbare og antistatiske. (ettermontering mulig) Ikke tilgjengelig i kombinasjon med gyrospyling 101.4940.0/101.4990.0 og oppsteg 101.4520.1.

**Merk:**

**Må ikke brukes til pasienttransport!**

## **medi-matic** LED undersøkelseslampe



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.3140.0</b>	<p><b>LED undersøkelseslampe*</b></p> <p>Fleksibel justering, sikker og enkel posisjonering. Lyseffekt 30.000 Lux ved 0,5 m<sup>2</sup>, stort homogent lysfelt for maksimal oversikt, belysningsområde Ø 18 cm ved 0,5 m<sup>2</sup>. Still inn fargetemperatur fra 4400 K, lysstyrke kan dimmes trinnløst.</p> <p>Rask rengjøring takket være lukket konstruksjon.</p> <p>Vedlikeholdsfree takket være LED-teknologi. Med ekstern strømadapter. Oppfyller de normative kravene i EN 60601-1 og EN 60601-2-41.</p> <p>Med festeklamme for feste til eksisterende sideskinne, for undersøkelsesstoler i seriene medi-matic, arco eller arco-matic.</p> <p>For Medi-matic undersøkelsesstoler uten sideskinne på seteseksjon kan teleskopstang 101.3110.0, 101.3120.0 eller 101.0313.0 brukes som lampefeste.</p>

\*. Dette produktet er en vareartikkel som selges under OEM merkenavn.


2. Toleranse fra -10 % til +20 %



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.3150.0</b>	<p><b>LED undersøkelseslampe*</b></p> <p>Samme som modell 101.3140.0, men med ekstra skinneklemme og skinnebrakett, for undersøkelsesstoler fra seriene medi-matic, arco eller arco-matic med sideskinner på setsekjonen.</p> <p>Armen kan brukes til å øke dreievinkelen på LED undersøkelseslampen for å sikre enkel bruk med undersøkelsesstoler med elektrisk justerbare benstøtter.</p>

**Merk:**

**LED undersøkelseslampe kan ikke brukes sammen med den integrerte versjonen av vidan2 videokolposkop!**

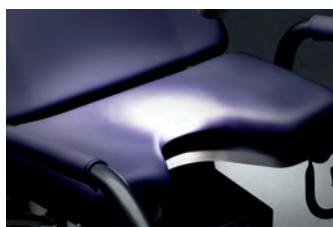

\* Dette produktet er en vareartikkel som selges under OEM merkenavn.

## **medi-matic** LED undersøkelseslampe



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.3110.0</b>	<b>Teleskopstang, høyre*</b> For fest av LED undersøkelseslampe 101.3140.0 på høyre side direkte på medi-matic undersøkelsesstol, trinnløst høydejusterbar fra 600 mm til 970 mm, laget av rustfritt stål.
<b>101.3120.0</b>	<b>Teleskopstang venstre*</b> Samme som 101.3110.0, men for fest på venstre side. (uten bilde)

\* Dette produktet er en vareartikkel som selges under OEM merkenavn.



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.3130.0</b>	<p><b>Teleskopstang for kolposkoparmholder*</b></p> <p>Stativrør for feste av LED undersøkelseslampe 101.3140.0, for bruk på medi-matic undersøkelsesstol med kolposkoparmholder, trinnløst høydejusterbar fra 800 mm - 1.400 mm, laget av rustfritt stål.</p> <p>Kan ettermonteres på eksisterende kolposkoparmholder.</p>

\* Dette produktet er en vareartikkel som selges under OEM merkenavn.

## **medi-matic** Tilbehør for gynekologi



---

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

**101.2050.0** Pusskuff i rustfritt stål, grunn  
325 × 265 × 40 mm.  
Tilleggspris



---

**101.2010.0** Pusskuff i rustfritt stål, dyp  
355 × 325 × 65 mm.  
Tilleggspris



---

**101.4620.1** Setevarmer  
aktivering med håndkontrollenhet. Gjennomsnittlig strømforbruk ca. 20 watt, justerbar temperaturangivelse som vises i displayet.  
(Ikke tilgjengelig i kombinasjon med gyrospyling 101.4940.0 eller for stoler med urologisk tilleggsutstyr 115.7150.1).



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.4310.0</b>	<p><b>Kolposkoparmholder (u/kolposkop)</b> for <b>Leisegang</b>, Leica, Kaps og Zeiss, monteres på høyre eller venstre side av stolen etter ønske. For Kaps- og Zeiss-systemer, vennligst bestill nødvendig monteringsholder med tillegg fra din kolposkopleverandør.</p>

For informasjon om den integrerte SCHMITZ vidan 2 video-kolposkop med full HD-oppløsning, se side 48.





## medi-matic

### Anbefalt tilbehør for gynekologi

	<b>Modell nr.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>115.7150.1</b>	<b>115.7250.1</b>	<b>115.7550.1</b>
1x	101.3720.0	Hodepute	•	•	•
1x	101.4620.1	Setevarmer		•	•
1x	101.4900.0	2 strømmuttak	•		
1x	101.6800.0	2 strømmuttak		•	•
<b>Ben-/fotstøttesystemer, valgfritt</b>					
2 x	101.2270.0	Göpel-type benstøtter (stk.)	•	•	
2 x	101.1670.0	Vedleggklemmer (stk.)	•	•	
1x	101.1370.0	Sideskinner (par)	•	•	
2 x	101.1580.0	Håndtak (stk.)	•	•	
<b>Alternativ:</b>					
1x	101.4420.1	Fotstøtter (par)	•	•	•
<b>Alternativ:</b>					
1x	101.4550.0	Göpel-type benstøtter (par)	•	•	•
<b>Alternativ:</b>					
1x	101.2310.0	Ergo-steps (par)	•	•	
1x	101.1370.0	Sideskinner (par)	•	•	
<b>Full-HD videokolposkop</b>					
1x	113.0007.0	Videokolposkop vidan2	•	•	
1x	101.0531.0	Tilkoblingspakke	•	•	
<b>Alternativ:</b>					
1x	113.0009.0	Videokolposkop vidan2 mobil	•	•	•
1x	101.0620.0	Tilkoblingspakke	•	•	•






## **medi-matic for urologi**

Med medi-matic undersøkelsesstol får du en ressurs innen urologi og urodynamikk takket være sofistikert spesialisttilbehør.

## **medi-matic** Ekstra tilbehør for urologi, urodynamikk

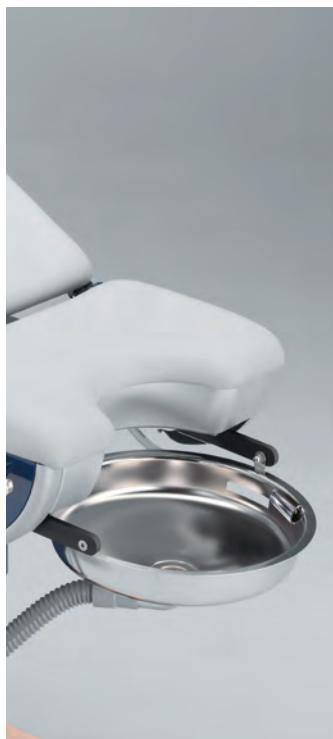

Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.4940.0</b>	<b>Pussbolle med gyrospyling</b> for modellene 115.7250.1 og 115.7550.1, rustfritt stål 18/10, stor og rund kum Ø 360 mm uttrekkbar, svingbar, låsbar i alle posisjoner, versjon for større hygiene uten profil, luktforseggling med sifonlås på stedet (vegg-/gulvsystem), vannregulering aktivert med fot kontroll eller håndkontroll, fleksibel utløpsslange og koblingsstykke, Ø 40 mm. I henhold til DIN EN 1717. Ingen pussbolle i plast som standardbeslag. (Ingen ettermontering mulig. Kan ikke brukes sammen med setevarme 101.4620.1) Inkl. plasttrekk 101.4810.1 for seteseksjonens polstring.
<b>101.4990.0</b>	<b>Pussbolle med gyrospyling</b> for modell 115.7150.1, vannregulering aktivert med fotkontroll integrert i bunnplatekledningen, for øvrig samme utførelse som 101.4940.0.
<b>100.1840.0</b>	<b>Sil</b> rund, rustfritt stål, for pussbolle med gyrospyling.
<b>101.4970.0</b>	<b>Brakett</b> rustfritt stål, kan svinges til venstre eller høyre side, for pussbolle med gyrospyling.



Modell nr. Beskrivelse

**101.2020.0 Pusskuff**

rustfritt stål 18/10, B 350 x L 325 x D 65 mm, med avløp, stopper og slange 3/4“, 1200 mm lang. Erstatter standard pusskuff i plast.

**100.1350.0 12-liters bøtte**

rustfritt stål 18/10, med utskjæring i lokket for innsetting av slange.



**101.6600.0 Avløpsrenne for væsker**

laget i rustfritt stål, for montering bak seteseksjonen.



**101.4950.0 Urologisk setepolstring**

for urodynamikkseksjon, B 585 mm, L 350 mm. Erstatter standard seteseksjonspolstring.

Tilleggspris

**101.4960.0 Seteadapter**

som forlengelse, todelt, for urodynamikkseksjon, hvert stykke: B 220 mm, L 150 mm.

(Krever sideskinner 101.1390.0)

## **medi-matic** Ekstra tilbehør for urologi, urodynamikk



---

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

<b>101.4980.0</b>	<b>Støttestang</b> for oppreist plassering (80°) av ryggseksjonen.
-------------------	---



---

<b>101.1380.0</b>	<b>Sideskinner (par)</b>
-------------------	--------------------------

rustfritt stål, 25 × 10 mm, festet til ryggseksjonen, for feste av tilbehør, 480 mm lang. (Ettermontering ikke mulig)

**Merk:**

**Undersøkelsesstoler med sideskinner 101.1380.0 i ryggseksjon er utstyrt med ryggseksjonspolstring som går i flukt med rammen i ryggseksjonen.**

Ytterligere tilbehør som armstøtter og infusjonsstang for montering på sideskinnene finner du i vår katalog for tilbehør til operasjonsbord, nr. 92.



---

<b>101.1390.0</b>	<b>Sideskinner (par)</b>
-------------------	--------------------------

rustfritt stål, 25 × 10 mm, 150 mm lang, for seteseksjonen, brukbar sammen med 101.4550.0, og feste av tilpasningsseksjon 101.4960.0.

(Ettermontering ikke mulig)



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.4930.0</b>	<b>Stikkontakt med ekvipotensialjording.</b>



## medi-matic Anbefalt tilbehør for urologi

Modell nr.	Beskrivelse	115.7150.1	115.7250.1	115.7550.1
1x 101.3720.0	Hodepute	•	•	•
1x 101.4900.0	2 strømmuttak	•		
1x 101.6800.0	2 strømmuttak		•	•
<b>Tilbehør, valgfritt</b>				
1x 101.4990.0	Pussbolle med gyrospyling	•		
1x 101.4940.0	Pussbolle med gyrospyling		•	•
1x 100.1840.0	Sil	•	•	•
1x 101.6600.0	Avløpsrenne for væsker	•	•	•
<b>Alternativ:</b>				
1x 101.2020.0	Pusskuff med avløp	•	•	•
1x 100.1350.0	12 l bøtte	•	•	•
1x 101.6600.0	Avløpsrenne for væsker	•	•	•
<b>Ben-/fotstøttesystemer, valgfritt</b>				
2 x 101.2270.0	Göpel-type benstøtter (stk.)	•	•	
2 x 101.1670.0	Festeklemmer (stk.)	•	•	
1x 101.1370.0	Sideskinner (par)	•	•	
2 x 101.1580.0	Håndtak (stk.)	•	•	
<b>Alternativ:</b>				
1x 101.4550.0	Göpel-type benstøtter (par)	•	•	•
1x 101.1380.0	Sideskinner (par)	•	•	•
1x 101.0019.0	Armlene (stk.)	•	•	•



## medi-matic

### Anbefalt tilbehør for urodynamikk

	<b>Modell nr.</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>115.7150.1</b>	<b>115.7250.1</b>	<b>115.7550.1</b>
1 x	101.4950.0	Urologisk setepolstring	•	•	•
1 x	101.1390.0	Sideskinner (par)	•	•	•
1 x	101.4960.0	Tilpasningsseksjon (to-delt)	•	•	•
1 x	101.4970.0	Brakett <sup>3</sup> (stk.)	•	•	•
1 x	101.4980.0	Støttestang (stk.)	•	•	•

#### Ben-/fotstøttesystemer, valgfritt

2 x	101.2270.0	Göpel-type benstøtter (stk.)	•	•	
2 x	101.1670.0	Festeklemmer (stk.)	•	•	
1 x	101.1370.0	Sideskinner (par)	•	•	
2 x	101.1580.0	Håndtak (stk.)	•	•	

#### Alternativ:

2 x	101.4420.1	Göpel-type benstøtter (stk.)	•	•	•
-----	------------	---------------------------------	---	---	---

#### Alternativ:

1 x	101.4550.0	Göpel-type benstøtter (par)	•	•	•
1 x	101.1380.0	Sideskinner (par)	•	•	•
1 x	101.0019.0	Armlene (stk.)	•	•	•

3. Merk: Denne braketten er nødvendig for sidestilling av pussbolle med gyrospyling 101.4940.0 eller 101.4990.0.



## vidan2

Det første integrerte videokolposkopet på markedet med full HD-oppløsning og berøringsskjerm.



Det teknisk avanserte videokolposkopet med full HD-oppløsning og en integrert datamaskin i undersøkelsesstolen er det ideelle ekstrautstyret til medi-matic undersøkelsesstol. Presis, lys, komfortabel.

### Maksimal presisjon med full HD-oppløsning

Et vellykket resultat fra kolposkopi avhenger av detaljer som bare kan oppdages med maksimal bildekvalitet. **vidan2** hjelper til med diagnosen. Støtter alle vanlige grensesnitt for integrering i ditt eget nettverk.

### Lege-pasient forhold

Den fritt svingbare, roterende og vippbare monitoren gir optimal visning av undersøkelsen og lar pasienten være med på undersøkelsen hvis hun ønsker det. Bygg tillit gjennom dialogen.

### Ergonomisk og tidsbesparende

Den integrerte datamaskinen garanterer at undersøkelsesresultatene kan sikkerhetskopieres raskt og enkelt rett på medi-matic undersøkelsesstolen. **vidan2** kan brukes i en optimalt ergonomisk og komfortabel sittestilling, og dermed lette legens arbeid.



## **vidan2**

### Enkel å håndtere

#### **Betjeningskontrollene**

Oversiktlige betjeningskontroller for en intuitiv kontroll og håndtering av videokolposkopet.

To fritt definbare forstørrelsesverdier, som lett kan nås ved å trykke på en knapp, bidrar til å redusere undersøkelsestiden.

#### **Overføring av ultralydbilder**

**vidan2** skjermen kan byttes over til en tilkoblet ultralydskanner eller en annen digital videokilde.



Svingfunksjonene til både monitor og monitorarm gjør det mulig å integrere pasienten i undersøkelsen og diagnostikken.

#### **Opplæring av assistentleger**

HDMI-grensesnittene tillater speiling av bildet som vises på **vidan2** skjermen på en annen skjerm. Denne funksjonen kan brukes til å støtte opplæring av assistentleger.

#### **Avbruddsfri strømforsyning (UPS)**

I tilfelle et uventet spenningsfall eller plutselig strømbrudd, vil avbruddsfri strømforsyning gi spenning i maksimalt 2 minutter. UPS-en vil sette systemet i sikker modus og lagre alle ulagrede data. Datamaskinen på **vidan2** vil først starte på nytt når UPS-en har ladet til 90 %.

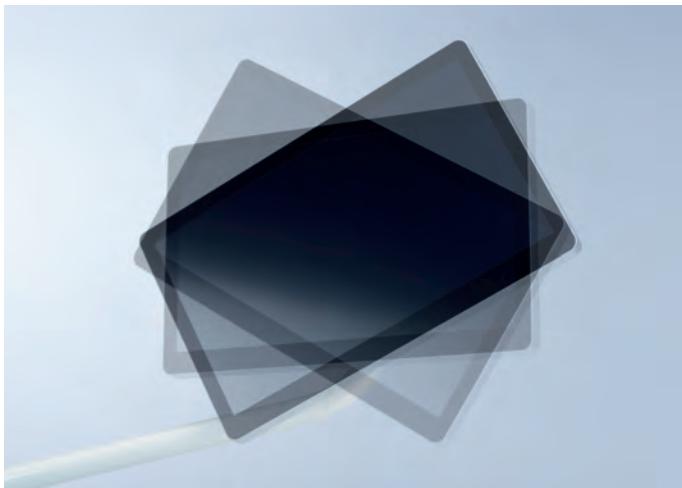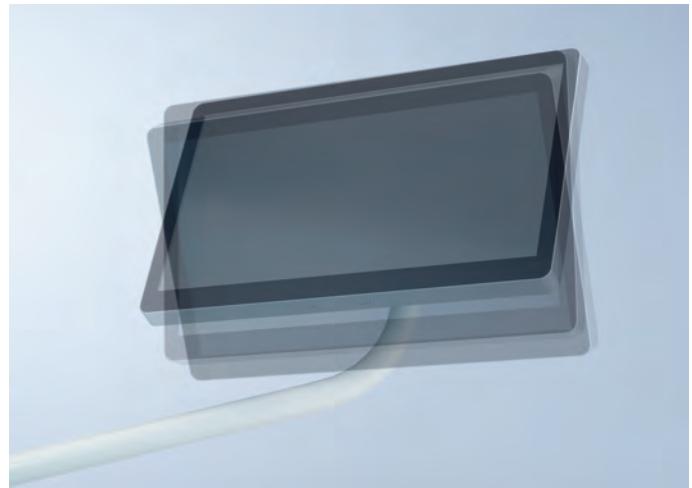

## **vidan2**

### Fleksibel skjerm

#### **Fritt svingbar skjerm**

Den fritt svingbare og vippbare skjermen støtter en ideell visualisering av undersøkelsen. Den 160° svingbare monitorarmen gjør at pasienten kan integreres enda tettere i undersøkelsen og diagnostikken.

#### **Betjening via berøringsskjerm**

Pasientdata kan legges inn direkte via berøringsskjermen på monitoren.

#### **Enkel å håndtere**

Bytte til ekstern videokilde direkte på skjermen.



## **vidan2**



Ultrasterk LED-belysning  
med grønt lys/grønt fargefilter

### **Undersøkelseslampe**

Ultrasterk LED-belysning med en fargetemperatur på ca. 5.700 K og 2 lysstyrketrinn. Kolposkopet fungerer som en ekstra undersøkelseslampe med et imponerende realistisk fargedisplay og en lysstyrke på 30.000 Lux på 250 mm avstand.

### **Grønt lys/grønt fargefilter**

Grønt lys med et ekstra elektronisk grønt fargefilter kan aktiveres for en forbedret visualisering av den vaskulære strukturen i celleprøver. Det øker kontrasten og støtter forbedring av individuelle strukturer, og letter dermed legens arbeid.

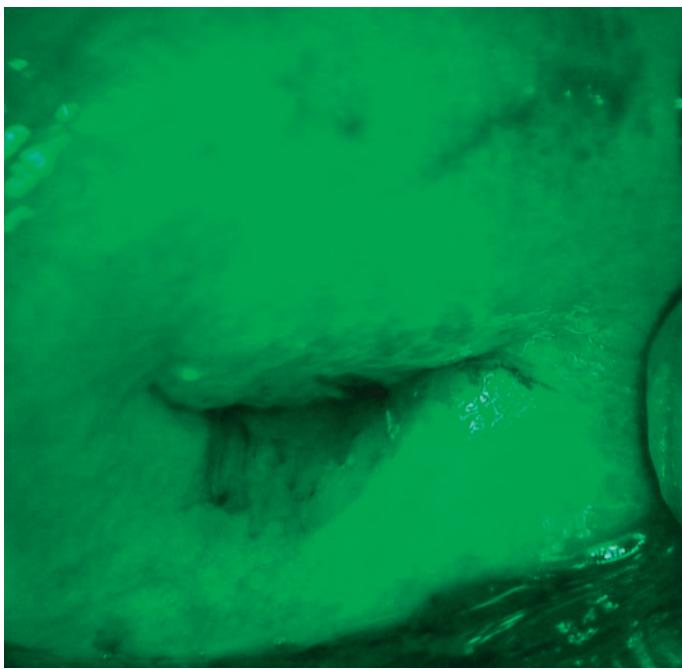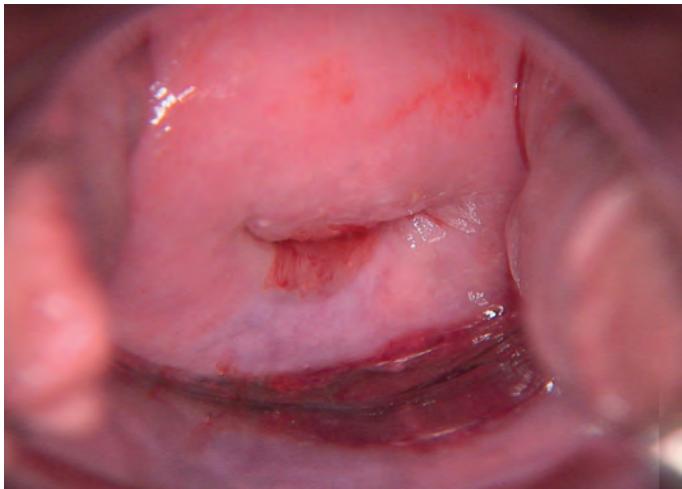

## **vidan2**

Enestående bildekvalitet og teknologi

### **Zoom**

Den variable zoomen gjør at forskjellige visninger kan vises med presis nøyaktighet. Opptil 36,5x variabel optisk forstørrelse betyr at selv de minste detaljene kan vises i full HD-kvalitet.

### **Autofokus**

Autofokus uavhengig av zoomfaktoren er aktiv i en arbeidsavstand på 250 - 330 mm. I tillegg kan fokus justeres manuelt.

### **Display**




Display og evaluering av undersøkelsesområdet på en 21,5" monitor. Det detaljrike bildet i full HD-bildekvaliteten letter diagnostikk og beslutningstaking for riktig behandling. Dermed gir høyprecisionsteknologi en ekstra sikkerhetsbonus for pasienten.

### **Grønt lys**

Grønt lys for en forbedret visualisering av karstrukturen (se også side 55).

### **Fotkontroll**

Funksjonen "Lagre bilde/video" kan i tillegg utløses av en knapp på fotkontrollen på en medi-matic undersøkelsesstol.

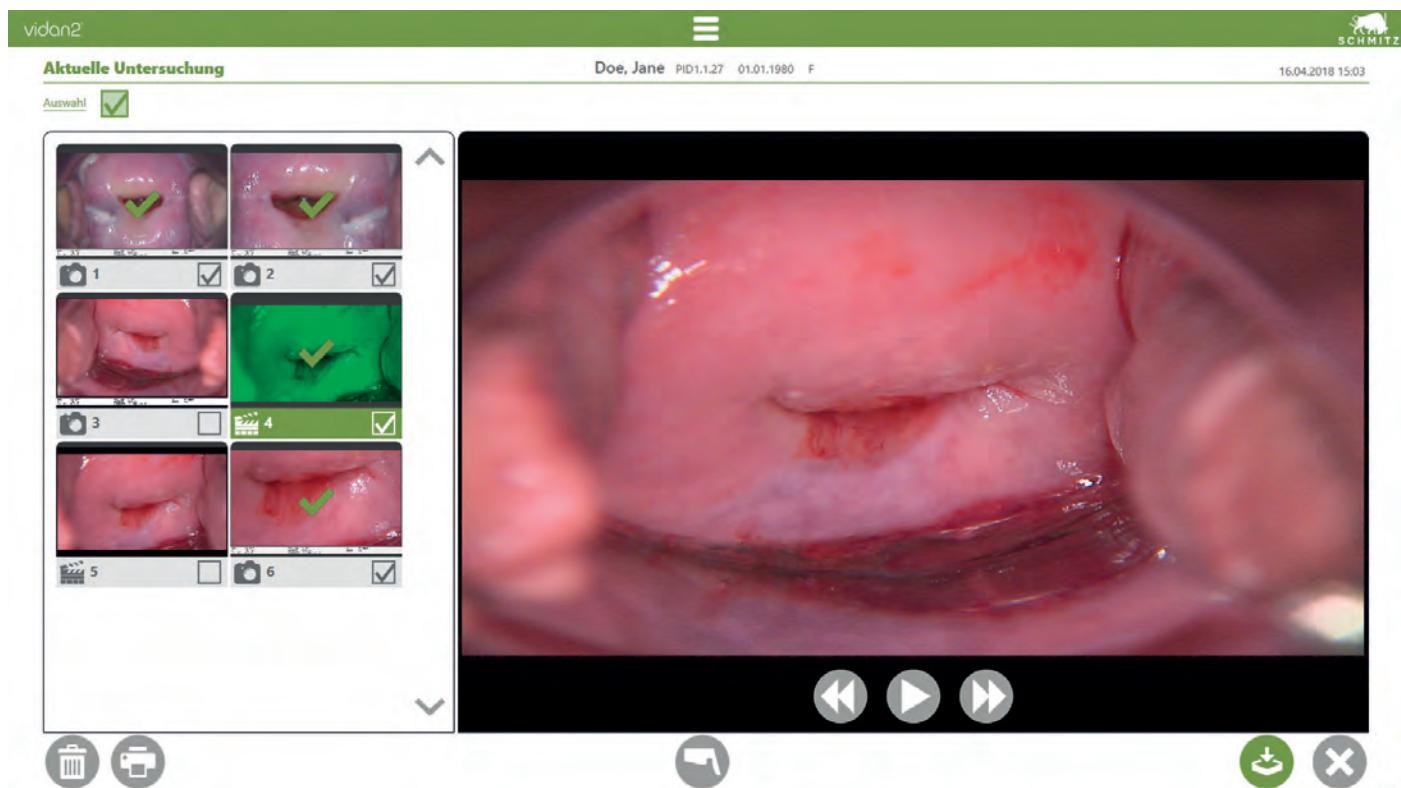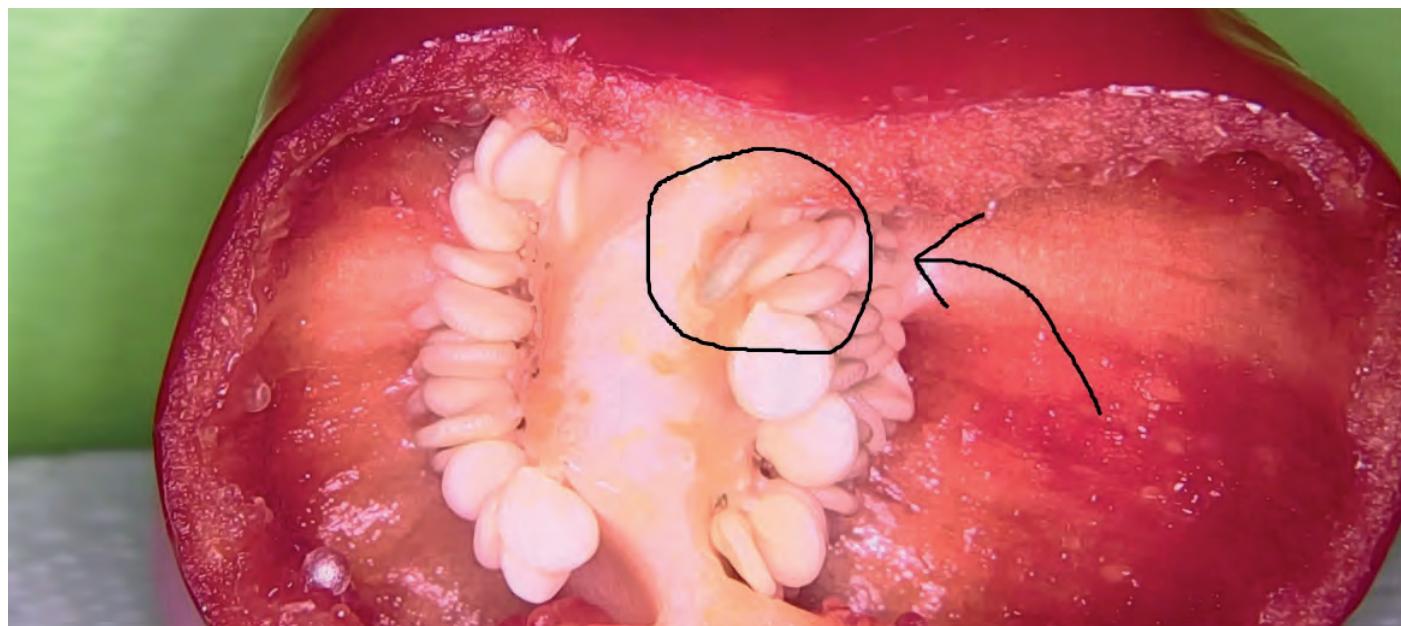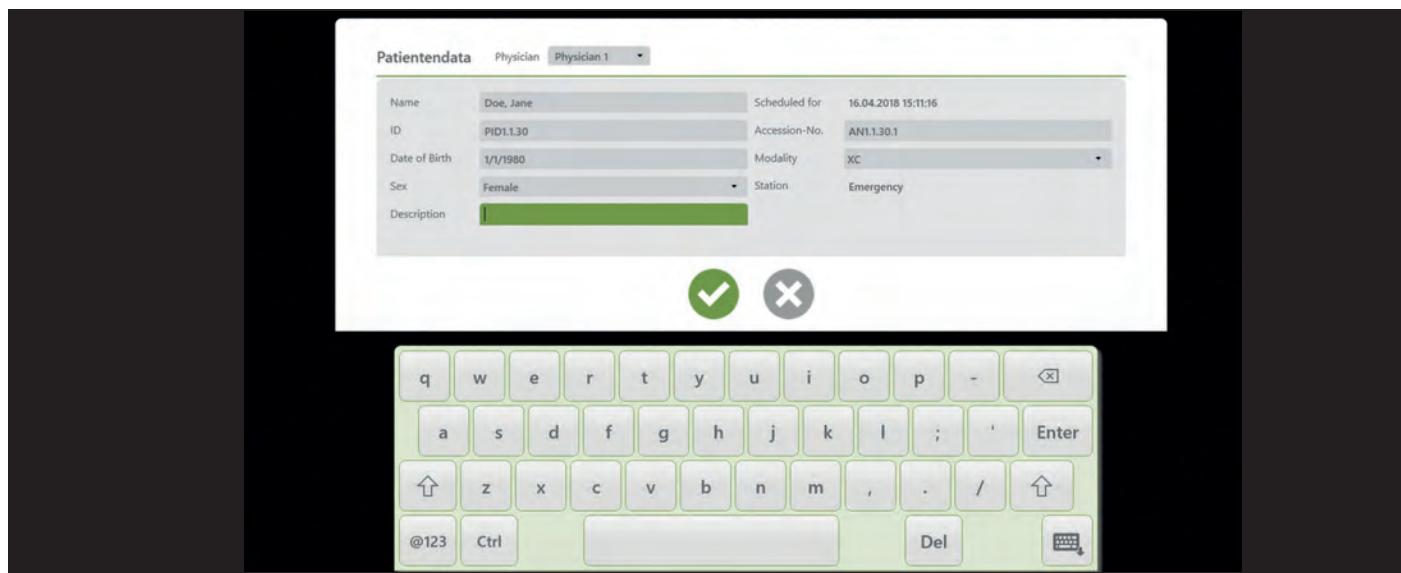

## **vidan2**

### Programvare

Den integrerte løsningen for effektivt arbeid komfortabelt, raskt og enkel å betjene

#### **Enkel innlegging av nye pasientdata direkte via berøringsskjermen**

Pasienttildeling kan derfor gjøres direkte på undersøkelsesstolen. Hvis **vidan2** er integrert i et eksisterende medisinsk informasjonssystem, kan pasientdata også nås fra systemet eller en arbeidsliste.

#### **Brukervennlig til minste detalj**

Nye bilder eller videoer blir automatisk tildelt pasienten. Den forhåndsinstallerte SCHMITZ-programvaren inkluderer en nyttig kommentarfunksjon for å kommentere bilder.

#### **Velge opprettede bilder/videoer for arkivering i pasientfilen.**

Dataene kan også eksporteres til en drop-mappe på lokalnettet eller til en USB-minnepinne koblet til undersøkelsesstolen.



## vidan2 – Modelloversikt

### Enestående bildekvalitet og teknologi



Modell nr.	Beskrivelse
<b>113.0007.0</b>	<p><b>Videokolposkop vidan2, integrert</b>          autarkisk system med integrert datamaskin og 21,5" berøringsskjerm.</p> <p>Videokolposkop montert på en fritt justerbar arm, montert på pasientens høyre side, med LED-lys, monitorarm montert på pasientens venstre side som standard, monitoren kan roteres, vippes og svinges.</p> <p>Monitorarm svingbar i 160°, pulverlakkert i samme farge som stolen. Videokolposkop med svingarm pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium. Monitor i grå/antrasitt farge.</p> <p>“Bilde/Videolagring”-knapp på fotkontrollen. Med nettverksgrensesnitt, HDMI og USB-inngang. Inkludert forhåndsinstallert vidan2 programvare for visning og arkivering.</p> <p>Det integrerte videokolposkopet vidan2 113.0007.0 er tilgjengelig ved kjøp av en medi-matic undersøkelsesstol modell 115.7250.1 eller 115.7550.1. For detaljert informasjon om undersøkelsesstolene, se side 11.</p>
<b>101.0531.0</b>	<p><b>Tilkoblingspakke</b>          for å oppgradere tilkoblingsmulighetene til vidan2. Pakken inkluderer en ekstra HDMI-inngang og en HDMI-utgang.</p> <p>Tilkoblingspakken kan ikke ettermonteres!</p> <p>(Uten bilde)</p>

#### Vennligst merk:

Det vil være begrenset sikt til skjermen når du bruker Göpel benstøtter og justerer Trendelenburg-posisjonen over ca. 16°.

Videokolposkopet 113.0007.0 kan ikke brukes i kombinasjon med følgende tilbehør for medi-matic undersøkelsesstoler:

- |            |  |
|------------|--|
| 101.4940.0 | Pussbolle med gyrospyling                        |
| 101.4990.0 | Pussbolle med gyrospyling                        |
| 101.4970.0 | Brakett  |
| 101.4310.0 | Kolposkoparm for kolposkop fra andre produsenter |
| 101.6540.0 | Brett med festearm                               |

*For alternativer for tilkobling til nettverk for medisinsk praksis se side 69!*



## vidan2

### Tekniske data

Videokamera	Full-HD 1080p
Skjermoppløsning	1 920 × 1 080 piksler
Forstørrelse	Opp til 36,5x kontinuerlig optisk forstørrelse på vidan2 skjerm. To fritt definerbare zoomverdier, kan enkelt stilles inn ved å trykke på en knapp.
Arbeidsavstand	250 – 330 mm
Fokusering	autofokus og manuell fokus
Hvitbalanse	manuelt
Fargefilter	grønt lys med elektronisk filter
LED-belysning	3 lysstyrketrinn opp til maks. 30.000 lux
Fargetemperatur	5700 K
Levetid på LED	10 år
Opptaksfunksjon	bilde (JPEG) og video (MPEG4) på maks. 1 minutters lengde, stillbilde
Monitor	21,5" Full HD-skjerm med medisinsk godkjennning
Videokilder	på skjermen, visning av bilder som kommer enten fra videokolposkopet eller fra en 2. eller 3. digital videokilde (valgfritt)
Nødstrømforsyning	opp til 2 minutter
vidan2 programvare	allerede forhåndsinstallert, for å støtte en sømløs arbeidsflyt fra visning til arkivering
Porter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0 Type A</li> <li>• LAN (RJ45 Gigabit Ethernet)</li> <li>• HDMI-IN (én port inkludert som standard, én ekstra port kan legges til med valgfri tilkoblingspakke)</li> <li>• HDMI-UT (én port med valgfri tilkoblingspakke)</li> </ul>

Nødvendig nettverk, eller HDMI-kabel, eller USB-medieenheter er ikke inkludert i leveransen! Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljert informasjon om dimensjoner, justering og tiltvinkler.



## **vidan2 mobil**

**Mobilt videokolposkop med full HD-oppløsning**

**Allsidighet uansett hvor det trengs!**





## **vidan2 mobil**

Mobilt videokolposkop med full HD-oppløsning

Presis – lyst – lett å håndtere

### **Forhåndsinstallert SCHMITZ-programvare**

Programvare med kommentar- og tegnefunksjon for å kommentere bilder.

### **Bilder og videoer arkiveres**

Arkivering via LAN-tilkobling, en sikker WLAN-tilkobling eller USB-port; en valgfri tilkobling via DICOM, GDT eller HL7-port er mulig – se merknaden i de tekniske dataene.

### **Vidan2 mobil med fleksibel plassering**

Fleksibel plassering rundt behandlingsstolen, noe som gjør den komfortabel og effektiv å bruke.

### **Solid 5-armet fotosokkel med hjul**

Fotosokkel med individuelt låsbare hjul sikrer stabilitet til enhver tid.



## **vidan2 mobil – Modelloversikt**

Modell nr.	Beskrivelse
<b>113.0009.0</b>	<p><b>vidan2 mobil videokolposkop</b></p> <p>Mobilt system med integrert datamaskin og 21,5" berøringsskjerm, kan kjøres på fot med 5 låsebare hjul, Ø 100 mm, mobil sokkel 815 x 660 mm, total høyde 1700 mm.</p> <p>Videokolposkop med LED-belysning på frittgående svingarm, 1000 mm langt. Vippbar skjerm med tre høydeinnstillinger. Mobil hjulsokkel pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium og RAL 7016 antrasittgrå, svingarm pulverlakkert i RAL 9006 hvit aluminium, skjerm i grå/antrasitt, med nettverksgrensesnitt, WLAN, USB-port og HDMI-inngang.</p> <p>Inkluderer forhåndsinstallert SCHMITZ vidan2 programvare for visning og arkivering.</p>
<b>101.0620.0</b>	<p><b>Tilkoblingspakke</b></p> <p>for å oppgradere tilkoblingsmulighetene til vidan2. Pakken inkluderer en ekstra HDMI-inngang og en HDMI-utgang.</p> <p>Inkluderer en ekstra fotkontroll for å lagre bilder/videoer. (kan ikke ettermonteres)</p> <p>(Uten bilde)</p>



## vidan2 mobil

### Tekniske data

Videokamera	Full-HD 1080p
Skjermoppløsning	1 920 × 1 080 piksler
Forstørrelse	Opp til 36,5x kontinuerlig optisk forstørrelse på vidan2 skjerm. To fritt definerbare zoomverdier, kan enkelt stilles inn ved å trykke på en knapp.
Arbeidsavstand	250 – 330 mm
Fokusering	autofokus og manuell fokus
Hvitbalanse	manuelt
Fargefilter	grønt lys med elektronisk filter
LED-belysning	3 lysstyrketrinn opp til maks. 30.000 lux
Fargetemperatur	5700 K
Levetid på LED	ca. 10 år
Opptaksfunksjon	bilde (JPEG) og video (MPEG4) på maks. 1 min. lengde, stillbilde
Monitor	21,5" Full HD-skjerm med medisinsk godkjenning
Videokilder	på skjermen, visning av bilder som kommer enten fra videokolposkopet eller fra en 2. eller 3. digital videokilde (valgfritt)
Nødstrømforsyning	opp til 2 minutter
vidan2 programvare	allerede forhåndsinstallert, for å støtte en sømløs arbeidsflyt fra visning til arkivering
Porter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0 Type A</li> <li>• LAN (RJ45 Gigabit Ethernet)</li> <li>• WLAN (kryptert tilkobling)</li> <li>• HDMI-IN (én port inkludert som standard, én ekstra port kan legges til med valgfri tilkoblingspakke)</li> <li>• HDMI-UT (én port med valgfri tilkoblingspakke)</li> <li>• Tilkoblingsgrensesnitt for fotkontroll (tilkoblingspakke kreves – kan ikke ettermonteres)</li> </ul>

Nødvendig nettverk, eller HDMI-kabel, eller USB-medieenheter er ikke inkludert i leveransen! Ta gjerne kontakt med oss for mer detaljert informasjon om dimensjoner, justeringer og tiltvin-kler.



## vidan2

### Tilkobling til eksisterende programvare på klinikken

#### **Informasjon om tilkobling til medisinsk klinikkprogramvare**

vidan2 kan betjenes autonomt og uavhengig eksisterende programvare på klinikken via en USB-minneenhet (ikke inkludert i leveransen) for arkivering av bilder og videoer. I tillegg kan arkivering gjøres gjennom en nettverkskobling via en spesifisert utdatamappe i det lokale nettverket.

Eventuelt kan vidan2 også integreres i eksisterende IT-systemer via DICOM, GDT eller HL7 grensesnitt. Vennligst sjekk med din IT-tjenesteleverandør om vidan2 kan integreres i den eksisterende medisinske programvare på klinikken.

SCHMITZ kobler ikke til, installerer og/eller implementerer vidan2 programvare inn i eksisterende IT-systemer og fungerer heller ikke som rådgiver angående dette. SCHMITZ garanterer heller ikke integrering av programvaren i eksisterende IT-systemer og andre videokilder, for eksempel en ultralydenhet.

---

§ *Vær oppmerksom på lovgivning om medisinsk utstyr, spesielt operatørforordningen for medisinsk utstyr for alle potensielle forbindelser.*



Design: Rainer Schindhelm

## **arco-matic**

Ekspsjonell design og avansert teknologi  
– og med utmerket valuta for pengene

### **Ergonomisk**

Bredde på polstring opp til 680 mm i ryggseksjon og en individuelt justerbar hodepute festet magnetisk til stolen gir pasientene en behagelig og komfortabel sittestilling.

Med en tilgangshøyde på kun 550 mm kan selv eldre eller fysisk funksjonshemmede pasienter enkelt ta plass på stolen, og selv på det laveste nivået forblir seteposisjonen horisontal.

### **Solid**

Designet for en arbeidsbelastning på inntil 250 kg, tilbyr stolen stor sikkerhet og mange behandlingsmuligheter selv for overvektige pasienter.

### **Tidssparende**

Optimalisert justeringshastighet og fire fritt valgbare minneposisjoner gir rask justering til den aktuelle posisjonen.

### **Funksjonell**

Ryggseksjonen kan flyttes til horisontal posisjon; dette betyr at pasienter kan plasseres flatt, f.eks. for ultralydundersøkelse, eller i sjokkstilling i nødstilfeller. En dyp gyn-utskjæringen på 155 mm gir forbedret tilgang til undersøkelsesområdet. Selv om pasienten er i en posisjon med høy bekkenhøyde, forblir pusskuffen i en horisontal posisjon.



Sentrallås

## arco-matic

Optimalisert funksjonalitet, høy komfort, og førsteklasses design

### Horisontal posisjon

Ryggseksjonen kan flyttes til horisontal posisjon; dette betyr at pasienter kan plasseres flatt, f.eks for en ultralydundersøkelse, eller i sjokkstilling i nødstifelle.

### Hygienisk

Glatt lukket design og fravær av hjørner og kanter gir forbedrede hygieniske forhold og enkel rengjøring. Selv området under stolen kan rengjøres på stolmodeller med hjul (valgfritt), som også muliggjør fleksibel bruk av behandlingsområdet og romutformingen.

### Prisbelønt design!

En målestokk for kvalitet og design: arco-matic har vunnet den prestisjetunge **Reddot Design Award**-prisen.





## **arco-matic** Modelloversikt




Modell nr.	Beskrivelse
<b>114.9600.0</b>	<b>arco-matic 200 M Undersøkelses- og behandlingsstol</b> med minnefunksjon for fire posisjoner, bekkenheving og ryggseksjon justerbar med elektromotor, setehøyde justerbar fra 550 mm til 1000 mm ved bekkenheving. Justerings- og minnefunksjoner aktivert med hånd- og fotkontroll.
<b>114.9700.0</b>	<b>arco-matic 300 M Undersøkelses- og behandlingsstol</b> med minnefunksjon for fire posisjoner, bekkenheving, ryggseksjon og fotstøtter (tilbehør) justerbar med elektromotor, setehøyde justerbar fra 550 mm til 1000 mm ved bekkenheving. Justerings- og minnefunksjoner aktivert med hånd- og fotkontroll.

**Merk:** Alle basismodeller er uten benposisjoneringssystem,  
velg blant 4 alternativer! (side 80 - 83)

Oppdag vår nye produkt og  
fargekonfigurator



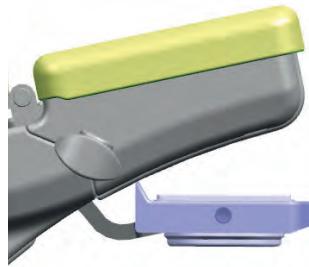

---

Pusskuff i krom-nikkelstål, festet i plastramme, forblir fast i horisontal posisjon med svingmekanisme.



---

#### Hånd- og fotkontroll

- Fleksibel plassering av den avtakbare fotkontrollen for et stressfritt og komfortabelt arbeidsmiljø
- Lager og henter opp til 4 minneposisjoner
- Myk oppstart av stolens bevegelser
- Kontroll av alle bevegelsessekvenser gjennom fot- og håndkontroller



## **arco-matic** **Standard utstyr**

Ergonomisk polstringer på sete, ryggseksjon og hodestøtte, SST pusskuff, ramme i plast, festet på plass med svingmekanisme, avtakbar, 325 × 175 × 65 mm (B × D × H), volum 2,5 l. Magasin for oppbevaring av papirrull med 400 eller 500 mm bredde, maks. diam. 140 mm, mulighet for å dekke enten rygg- og seteseksjonen eller kun seteseksjonen med papir. Med fotkontroll, bunnplate med 4 nivelleringsskruer, sølvgrå plastkledning. Polstring i henhold til fargekart. Fotstøttefester for rask fjerning eller individuelt horisontalt svingbare for fotstøtter eller Göpel-type benstøtter med integrerte håndtak (ikke tilgjengelig for stoler utstyrt med sideskinner 101.0463.0).

### **Strømtilkobling**

Tilkoblingskabel: 3 m med støpsel.  
Forbindelse: 100 - 24 V, 50/6 Hz, maks. 0,94 kW.  
Landsspesifikke versjoner på forespørsel.

### **Vekt**

Netto vekt: ca. 96 kg (114.9600.0)  
Netto vekt: ca. 100 kg (114.9700.0)  
Sikker arbeidsbelastning: 250 kg

### **Pulverlakkert finish**







Høykvalitets pulverlakk i RAL 9006 hvit aluminium. Blank finish, ekstremt slag- og ripebestandig. Enkel å rengjøre, motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler og miljømessige forhold.

### **Polstring**

Skummateriale på støtteflater, med førsteklasses slitesterkt kunstlær. Farger tilgjengelig i henhold til SCHMITZ fargekart i 4 farger i klassisk kvalitet og i 15 farger i komfort kvalitet.

### **Ved bestilling**

Vennligst oppgi følgende ved bestilling:  
Fot-/benstøttesystem: se side 80 - 83  
Farge på polstringer: se fargekart side 148

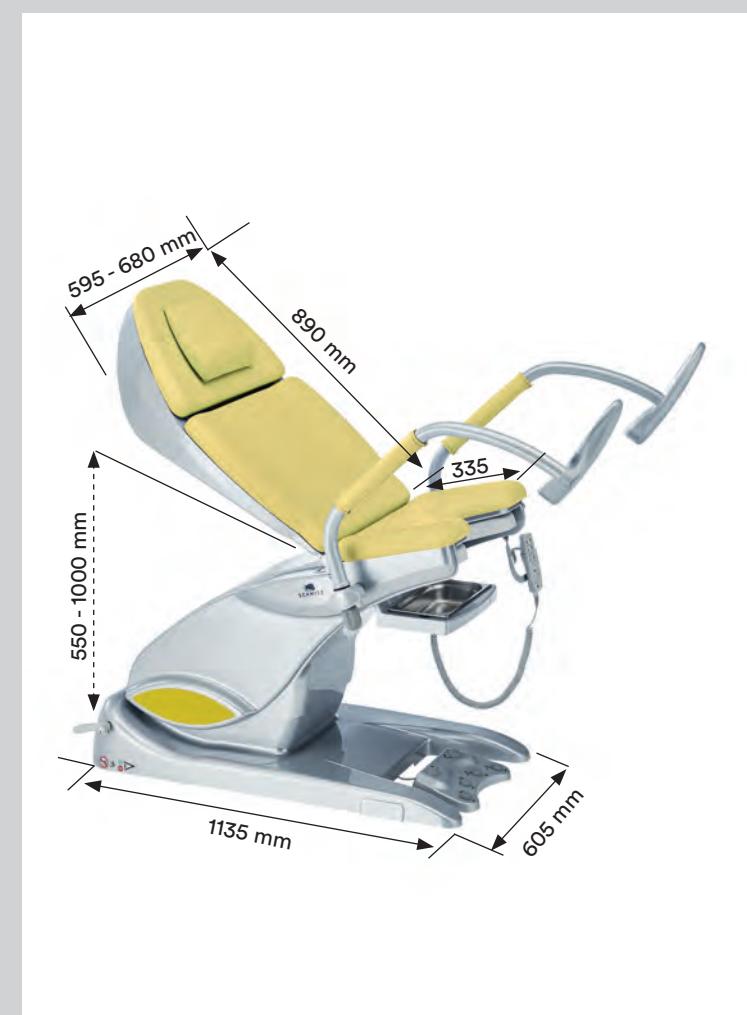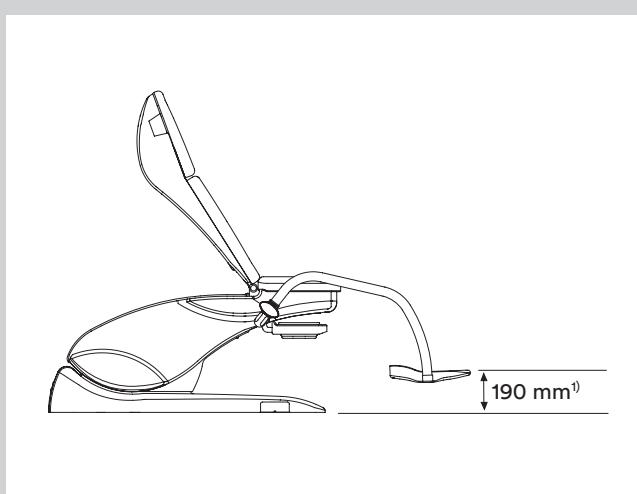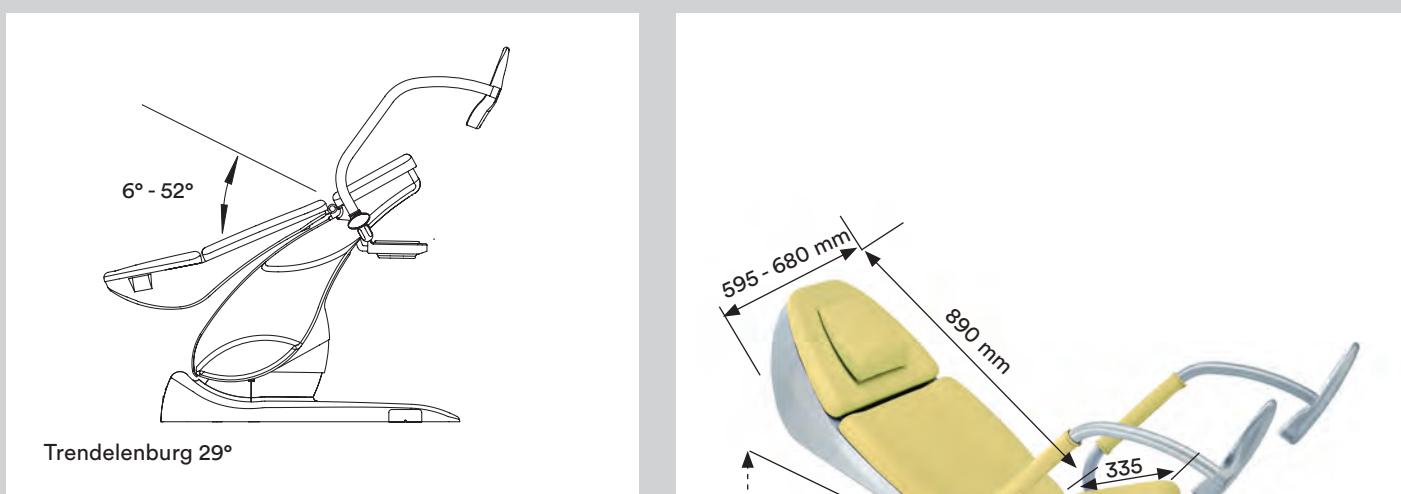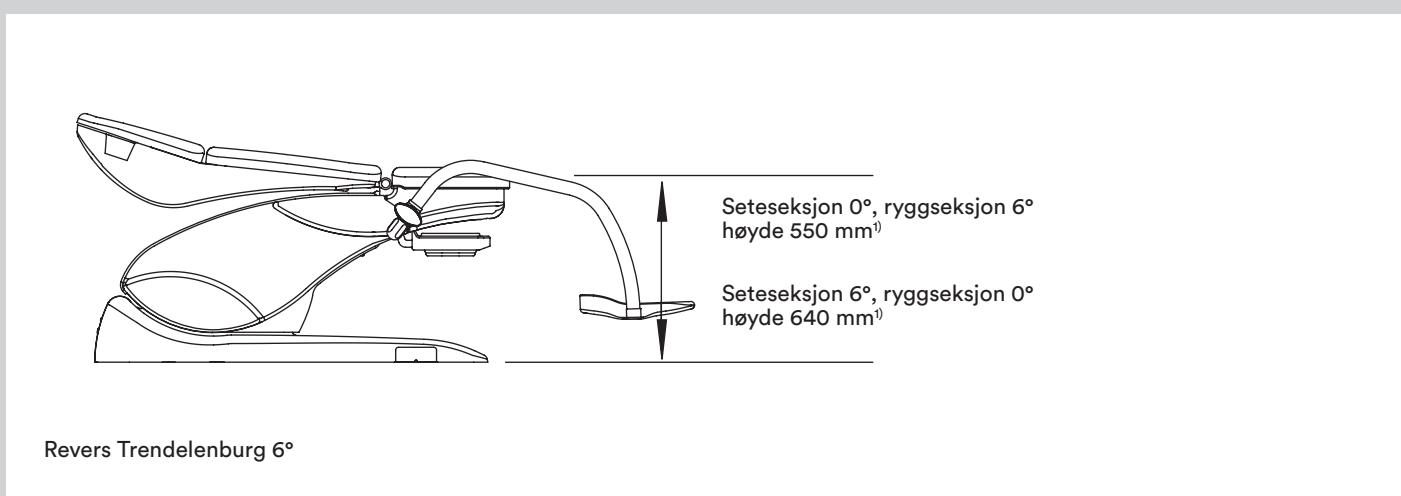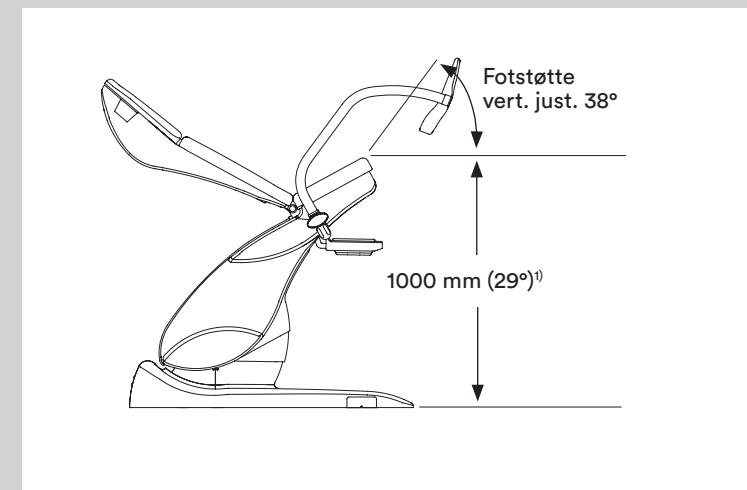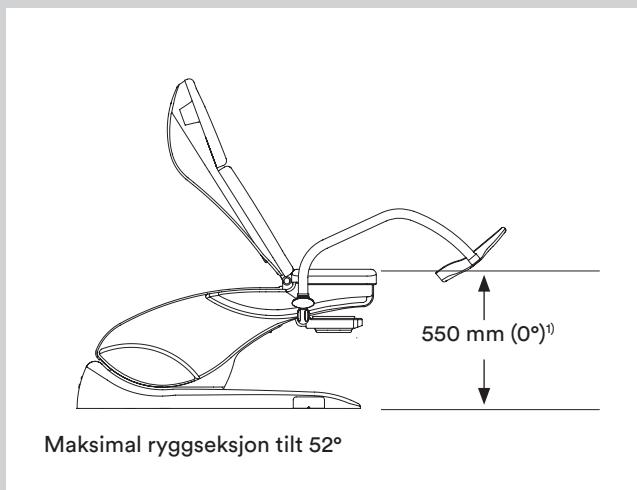

Design og dimensjoner kan endres.

<sup>1)</sup>Pluss på 11 mm i forbindelse med mobilitet 101.0466.0.

## **arco-matic** Justeringsfunksjoner og dimensjoner



reddot award 2017  
winner

### Dimensjoner

Sokkel	1135 × 605 mm
Bredde på polstring	595 mm (seteseksjon) 680 mm (ryggseksjon)
Tykkelse	50 mm
Sikker arbeidsbelastning	250 kg



Bekkenheving  
114.9600.0 og 114.9700.0

Ryggseksjonsjustering  
114.9600.0 og 114.9700.0

Elektromotorisk justering av  
fotstøtter 114.9700.0



## **arco-matic** Benstøttesystemer



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.0492.0</b>	<b>Fotstøtter (par)</b> med integrerte håndtak, pulverlakkert RAL 9006 hvit aluminium, kan svinges til siden, låsbar. Vi anbefaler 101.4820.0 plastdeksel av gjennomsiktig PU-materiale som beskyttelse til fotstøttene.
<b>101.0493.0</b>	<b>Benstøtter, Göpel-type, med integrert håndtak (par)</b> med integrerte håndtak, pulverlakkert RAL 9006 hvit aluminium. Benstøtter med integrert skumpolstring i sølvgrå, inkludert festestropp, stang av rustfritt stål 18/10.
<b>101.0459.0</b>	<b>Göpel benstøtte (stk.)</b> integrert skumpolstring i sølvgrå, inkludert festestropp, stang av rustfritt stål 18/10, uten festeklemme (krever sideskinner 101.0463.0 eller 101.0464.0 og 101.1670.0 festeklemmer).
<b>101.0463.0</b>	<b>Sideskinner (par)</b> for setseksemjonen, rustfritt stål 18/10, 25 x 10 mm, 290 mm lang.
<b>101.1670.0</b>	<b>Festeklemme (stk.)</b> roterende, rustfritt stål 18/10, for montering på sideskinner.



Posisjonering med UniLeg benstøtter



Posisjonering med UniLeg benstøtter

## **arco-matic** Benstøttesystemer



Modell nr. Beskrivelse

**101.0369.0 UniLeg benstøtter med peroneal nervebeskyttelse E, (par)**  
med peroneal nervebeskyttelse, høydejusterbar og spredbar fra fotenden, med gassfjærstøtte, plastbelegg med polstring for fot og underben, justerbar i alle posisjoner, med integrert sideskinnefeste.




**101.0678.0 UniLeg benstøtter E, (par)**

Samme som modell 101.0369.0 UniLeg, men uten peroneal nervebeskytter.

## **arco-matic** Tilbehør

Modell nr. Beskrivelse

---

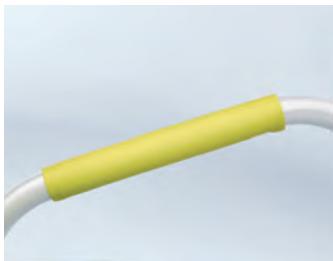

- 101.0473.0 Trekk i kunstlær (par)**  
for integrerte håndtak på fotstøtter, i henhold til fargekart,  
med glidelås.



- 101.0474.0 Trekk i kunstlær (par)**  
for integrerte håndtak av Göpel-type benstøtter, i henhold til  
fargekart, med glidelås.



- 101.0472.2 Hodepute**  
med magnetfeste for individuell tilpasning, polstring i kunst-  
lær i henhold til fargekart.



- 101.0475.0 Beskyttelsesdeksler (par)**  
av gjennomsiktig plastmateriale, for fotstøtter.



---

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

**101.0489.0 Papirrull**

500 mm bred, for oppbevaring i det integrerte rommet i ryggseksjonen.



---

**101.0477.0 Plastbeskytter**

av gjennomsiktig plastmateriale, for setsekspasjon.



---

**101.0495.0 Pusskuff med praktisk holder**

med svingmekanisme sikrer horisontal posisjon i alle stolposisjoner, krom-nikkelstål med plastramme 325 x 175 x 65 mm (B x L x H), volum 2,5 liter.

## **arco-matic** Tilbehør




Modell nr. Beskrivelse

---

**101.0464.0 Sideskinne (stk.)**

for seteseksjonen, rustfritt stål 18/10,  
25 × 10 mm, 150 mm lang.

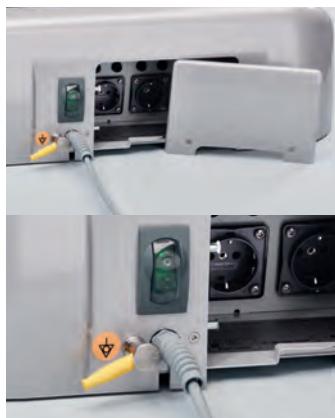

---

**101.0482.0 2 strømmuttak**

iht. til EN 60601-1. (ettermontering ikke mulig)

---

**101.0483.0 2 strømmuttak**

lik 101.0482.0, men "sveitsisk type"-kontakt.  
(ettermontering ikke mulig)  
(uten bilde)

---

**101.0481.0 Stikkontakt for ekvipotensialjording**




---

**101.0494.0 Kolposkoparmholder**

for Leisegang, Leica, Kaps og Zeiss systemer, høyre- eller venstrevidig beslag. For Kaps- og Zeiss-systemer, vennligst bestill nødvendig monteringsrør med tilbehør fra din kolposkopleverandør.

(uten kolposkop)

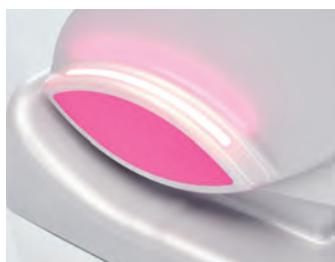

Modell nr. Beskrivelse

**101.0487.0 LED dekorlys (par)**

LED dekorlys på begge sider over fargepanelet, valg av 13 forskjellige farger, utskiftbare takket være en bryter under fargepanelene, tone-i-tone fargenyanse allerede tilpasset valgte farge på polstring (hvit LED for brune, svarte og grå polstringer).



**101.0488.0 Fargepanel (par)**

med farge tilpasset fargen på stolpolstringer.



**101.0469.0 Legens fotstøtte**

LH-montering, pasientens POV.

**101.0468.0 Legens fotstøtte**

RH-montering, pasientens POV. (uten bilde)



**101.0466.0 Mobilitet**

2 svingbare tvillinghjul, Ø 75 mm, 4 faste hjul Ø 50 mm, elektrisk ledende, med sentrallås (ettermontering mulig).

**Merk: Må ikke brukes til pasienttransport!**



Horisontal posisjonering med benplate

## **arco-matic** **Tilbehør**



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.0471.0</b>	<b>Benplate</b>
	integrert i seterammen, uttrekkbar, polstret overflate av myk plast (TPE), grå. Sikker arbeidsbelastning: 50 kg. Mål på polstring: 480 x 373 x 30 mm (B x L x H). (Ettermontering mulig, vennligst kontakt vår serviceavdeling.)
<b>101.0465.0</b>	<b>Sideskinner for ryggseksjon (par)</b>
	rustfritt stål 18/10, 25 x 10 mm, på ryggseksjonen, for feste av tilbehør, 400 mm lang. Ytterligere tilbehør som armstøtter og infusjonsstang for montering på sideskinnene finner du i vår katalog for tilbehør til operasjonsbord, nr. 92.

**101.0471.0****Benplate**

integrert i seterammen, uttrekkbar, polstret overflate av myk plast (TPE), grå. Sikker arbeidsbelastning: 50 kg.  
Mål på polstring: 480 x 373 x 30 mm (B x L x H).  
(Ettermontering mulig, vennligst kontakt vår serviceavdeling.)

**101.0465.0****Sideskinner for ryggseksjon (par)**

rustfritt stål 18/10, 25 x 10 mm, på ryggseksjonen, for feste av tilbehør, 400 mm lang.

Ytterligere tilbehør som armstøtter og infusjonsstang for montering på sideskinnene finner du i vår katalog for tilbehør til operasjonsbord, nr. 92.



## arco kombinert med Orbit

Et optimalt designkonsept for gynekologiske klinikker

Enten det er den lave tilgangshøyden, noe som gjør det lettere for pasienter å sette seg, eller minnefunksjonen som tillater en rask justering til den aktuelle posisjonen eller den dype gyn. utskjæringen, som letter undersøkelsen – er både arco og arco-matic designet for de spesielle kravene til daglig medisinsk praksis.

De er perfekt supplert med Orbit – det modulære forsynings- og avfallskonseptet for gynekologiske arbeidsplasser, som kan justeres til hvert oppsett. De inngår dermed i et spesielt funksjonelt innredningskonsept som finnes i mange flotte fargeskalaer.

For mer informasjon om Orbit sortiment, se side 122 ff.

### Farger i illustrasjonen:

#### arco:

polstringer i bringebærød 103

plastelementer i sølvgrå

Svingbar krakk:

polstring bringebær 103

#### Orbit:

kabinett i hvite aluminium RAL 9006

frontpaneler i lyngfiolett RAL 4003

håndtak i hvite aluminium RAL 9006

plastelementer i sølvgrå



Design: Rainer Schindhelm

## arco

### Høy komfort, førsteklasses design

#### Ergonomisk

I kombinasjon med den individuelt justerbare hodeputen festet magnetisk til stolen, har polstringene på hodeseksjon, ryggseksjon og seteseksjon en spesiell konveks form og gir pasientene behagelige og komfortable sittestilling.

Med en tilgangshøyde på kun 550 mm kan selv eldre eller fysisk funksjonshemmede pasienter enkelt ta plass på stolen, og selv på det laveste nivået forblir seteposisjonen horisontal.

#### Solid

Designet for en arbeidsbelastning på 250 kg, tilbyr stolen stor sikkerhet og mange behandlingsmuligheter selv for overvektige pasienter.

#### Tidssparende

Optimalisert justeringshastighet og opptil fire fritt valgbare minneposisjoner gir rask justering til den aktuelle posisjonen. (avhengig av modell)

#### Funksjonell

Den dype gyn. utskjæringen på 155 mm gir forbedret tilgang til undersøkelsesområdet. Selv om pasienten er i en posisjon med høy bekkenhøyde, forblir pusskuffen i en horisontal posisjon.





## **arco**

Optimalisert bruk, høy komfort,  
førsteklasses design

### **Hygienisk**

Lukkede områder og fravær av hjørner og kanter gir forbedrede hygieniske forhold og enkel rengjøring.

### **LED dekorlys**

LED dekorlys er tilpasset til behandlingsrommet ditt og skaper en hyggelig atmosfære.

### **Arbeid fleksibel og spar tid**

med opptil 4 fritt valgbare minneposisjoner.




## **arco** Modelloversikt

Modell nr.	Beskrivelse
<b>114.8500.0</b>	<b>arco 100 Undersøkelses- og behandlingsstol</b> elektromotorisk bekkenheving. Ryggseksjon festet til sete- seksjon i fast vinkel (50°), setehøyde justerbar fra 550 mm til 1000 mm ved bekkenheving. Justeringsfunksjoner aktivert av fotkontroll.
<b>114.8600.0</b>	<b>arco 100 M Undersøkelses- og behandlingsstol</b> som 114.8500.0, men med ekstra minnefunksjon for 2 posisjoner. Justerings- og minnefunksjoner aktivert med hånd- og fotkontroll.
<b>114.8700.0</b>	<b>arco 200 M Undersøkelses- og behandlingsstol</b> med minnefunksjon for 4 posisjoner, bekkenheving og fot- støtter (tilbehør) med elektromotorisk justering, ryggseksjon festet til seteseksjon i fast vinkel (50°), setehøyde justerbar fra 550 mm til 1000 mm ved bekkenheving. Justerings- og minnefunksjoner aktivert med hånd- og fotkontroll.

**Alle basismodeller er uten benposisjoneringssystem, velg blandt 4 alternativer! (side 102 - 105)**

Oppdag vår nye produkt og fargekonfigurator



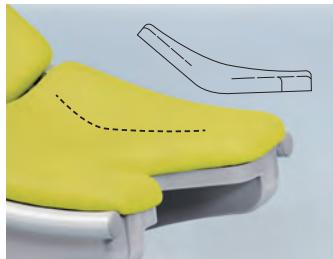

---

Seteprofil er formet rett for en avslappet og profesjonell undersøkelsesstilling.



---

Pusskuff i krom-nikkelstål, i plastramme, festet på plass med svingmekanisme som sikrer en horisontal stilling i alle stolposisjoner.



---

#### Hånd- og fotkontroll

- Fleksibel plassering av den avtakbare fotkontrollen for et stressfritt og komfortabelt arbeidsmiljø
- Lager og henter opptil 4 minneposisjoner
- Myk oppstart av stolbevegelsene
- Kontroll av alle bevegelsessekvenser med fot- og håndkontroller



## arco

### Standard utstyr

Ergonomisk polstring på sete, ryggseksjon og hodestøtte, SST pusskuff i plastramme, festet på plass med svingmekanisme, avtakbar, 325 × 175 × 65 mm (B × D × H) volum 2,5 l. Magasin for oppbevaring av papirrull med 400 eller 500 mm bredde, maks. diam. 140 mm, mulighet for å dekke enten rygg- og seteseksjonen eller kun seteseksjonen med papir. Med fotkontroll, bunnplate med 4 nivelleringskruer, sølvgrå plastkledning, ramme pulverlakkert i henhold til vårt fargekart. Polstring i henhold til fargekart.

Fotstøttefester for rask fjerning eller individuelt svingbare på horisontalt nivå av fotstøtter eller Göpel-type benstøtter med integrerte håndtak (ikke tilgjengelig for utstyr med sideskinne).

#### Strømforsyning:

Tilkoblingskabel 3 m med støpsel. Strømforsyning: 100 - 240 V, 50/6 Hz, maks. 0,94 kW.

Landsspesifikke versjoner på forespørsel.

#### Vekt:

Netto vekt:	ca. 96 kg (114.8500.0 og 114.8600.0)
Netto vekt:	ca. 100 kg (114.8700.0)
Sikker arbeidsbelastning:	250 kg

#### Pulverlakkert finish:

Pulverlakk av høy kvalitet. Blank finish, ekstremt slag- og ripebestandig. Enkel å rengjøre, motstandsdyktig mot desinfeksjonsmidler og miljømessige forhold. Farger tilgjengelig i henhold til SCHMITZ fargekart uten ekstra betaling.

#### Polstring:




Skummateriale på støtteplate, med førsteklasses, slitesterke belegg i kunstlær. Farger tilgjengelig i henhold til SCHMITZ fargekart uten ekstra betaling (klassisk og komfort).

#### Ved bestilling:

Vennligst oppgi følgende ved bestilling:

Fot-/benstøttesystem:	se side 102 - 105
Farge på polstringer:	se fargekart side 148
Plast emaljebelegg for ramme:	se fargekart side 148

Modell nr.	Beskrivelse
<b>100.0510.0</b>	<b>Ytterligere valgfrie farger iht. til RAL fargekart Tilleggspris (uten bilde)</b>

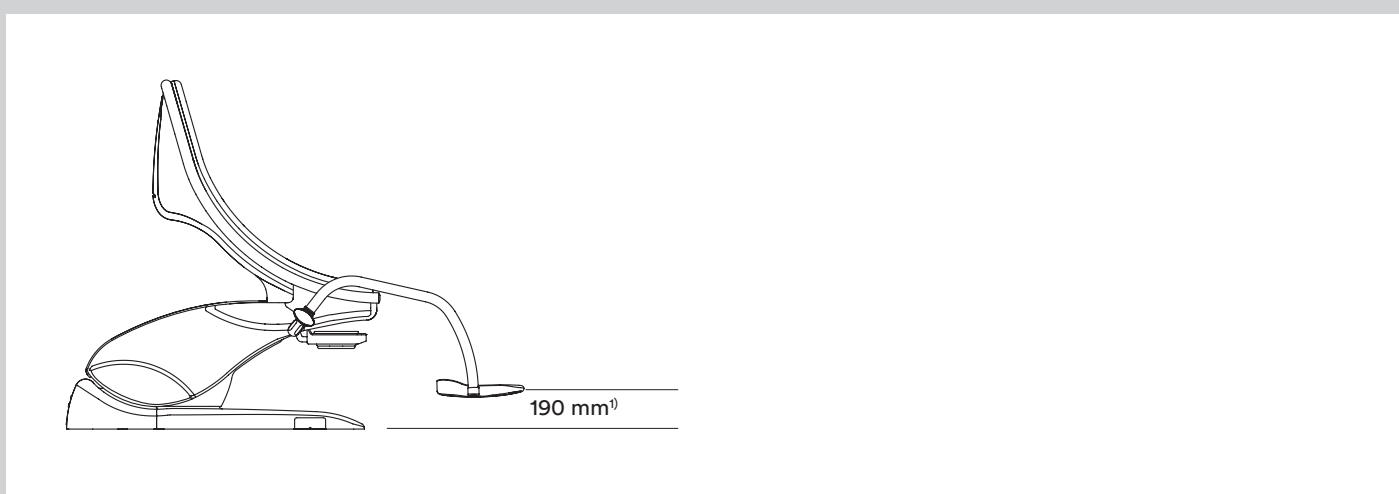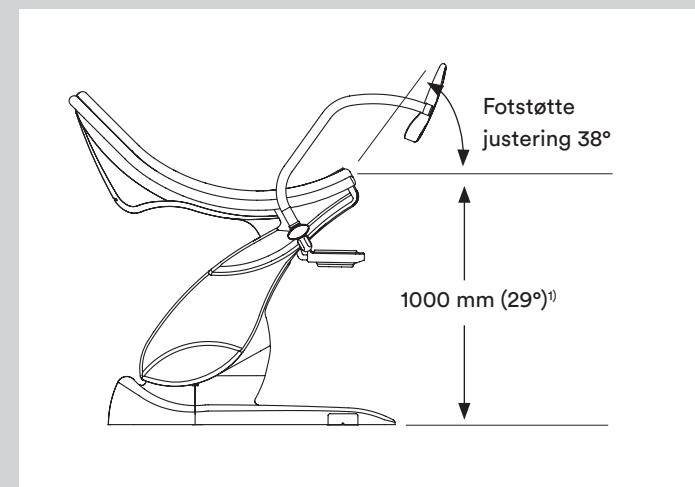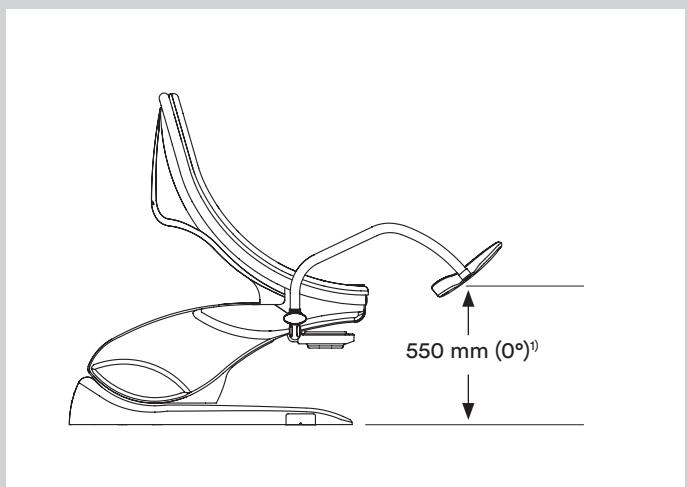

## **arco**

### Justeringsfunksjoner og dimensjoner



**reddot award 2017**  
winner

#### Dimensjoner

Sokkel	1135 x 605 mm
Bredde på polstring	595 mm (seteseksjon) opp til 650 mm (ryggseksjon)
Tykkelse	50 mm
Sikker arbeidsbelastning	250 kg



Bekkenheving  
114.8500.0 til 114.8700.0

Elektromotorisk justering av fotstøtter  
114.8700.0



## arco Benstøttesystemer

Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.0456.0</b>	<p><b>Fotstøtter (par)</b>            med integrerte håndtak, pulverlakkert i henhold til fargekart, kan svinges til siden, låsbar.            Vi anbefaler 101.4820.0 plastdeksel av gjennomsiktig PU-materiale som beskyttelse til fotstøttene.</p>
<b>101.0457.0</b>	<p><b>Benstøtter, Göpel-type, med integrert håndtak (par)</b>            med integrerte håndtak, pulverlakkert i henhold til fargekart, benstøtter med integrert skumpolstring i sølvgrå, inkludert festestropp, stang av rustfritt stål 18/10.</p>
<b>101.0459.0</b>	<p><b>Göpel benstøtte (stk.)</b>            integrert skumpolstring i sølvgrå, inkludert festestropp, stang av rustfritt stål 18/10, uten festeklemme. (krever sideskinner 101.0461.0 eller 101.0462.0, samt 101.1670.0 festeklemmer).</p>
<b>101.1670.0</b>	<p><b>Festeklemme (stk.)</b>            roterende, rustfritt stål 18/10, for montering på sideskinner.</p>
<b>101.0461.0</b>	<p><b>Sideskinner (par)</b>            for seteseksjonen, rustfritt stål 18/10, 25 × 10 mm, lengde 290 mm.</p>





Posisjonering med UniLeg benstøtter  
(bilde med arco-matic undersøkelsesstol)



Posisjonering med UniLeg benstøtter  
(bilde med arco-matic undersøkelsesstol)

## **arco** Benstøttesystemer



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.0369.0</b>	<b>UniLeg benstøtter (par)</b> med peroneal nervebeskyttelse høydejusterbar og spredbar fra fotenden, med gassfjærstøtte, plastbelegg med polstring for fot og underben, justerbar i alle posisjoner, med integrert sideskinnefeste.
<b>101.0678.0</b>	<b>UniLeg benstøtter (par)</b> Samme som modell 101.0369.0 UniLeg, men uten peroneal nervebeskytter.



## **arco** **Tilbehør**

Modell nr. Beskrivelse


---



- 101.0473.0** **Trekk i kunstlær (par)**  
for integrerte håndtak på fotstøtter, i henhold til fargekart,  
med glidelås.



- 101.0474.0** **Trekk i kunstlær (par)**  
for integrerte håndtak av Göpel-type benstøtter, i henhold til  
fargekart, med glidelås.

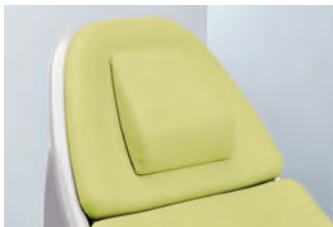

- 101.0472.2** **Pute**  
med magnetfeste, polstring i kunstlær i henhold til fargekart.



- 101.0475.0** **Beskyttelsesdeksler (par)**  
for fotstøtter.



- 101.0476.0** **Beskyttelsestrekk**  
av gjennomsiktig plastmateriale, for setsekssjon.



---

Modell nr.	Beskrivelse
------------	-------------

**101.0489.0 Papirrull**

500 mm bred, for oppbevaring i det integrerte rommet i ryggsesjonen.



---

**101.0495.0 Pusskuff med praktisk holder**

med svingmekanisme for å opprettholde horisontal posisjon i alle stolposisjoner, kum av krom-nikkelstål med plastramme  
325 x 175 x 65 mm (B x L x H), 2,5 liters volum.




## **arco** **Tilbehør**



Modell nr.	Beskrivelse
<b>101.0462.0</b>	<b>Sideskinne (stk.)</b> for seteseksjonen, rustfritt stål 18/10, 25 × 10 mm, 150 mm lang.
<b>101.0482.0</b>	<b>To stikkontakter</b> iht. til EN 60601-1. (ettermontering ikke mulig)
<b>101.0483.0</b>	<b>To stikkontakter</b> lik 101.0482.0, men "sveitsisk type". (ettermontering ikke mulig) (uten bilde)
<b>101.0481.0</b>	<b>Stikkontakt for ekvipotensialjording</b>
<b>101.0467.0</b>	<b>Kolposkoparmholder</b> for <b>Leisegang</b> , Leica, Kaps og Zeiss systemer, RHS eller LHS beslag. For Kaps- og Zeiss-systemer, vennligst bestill nødvendig monteringsrør med tilbehør fra din kolposkopleverandør. (uten kolposkop)



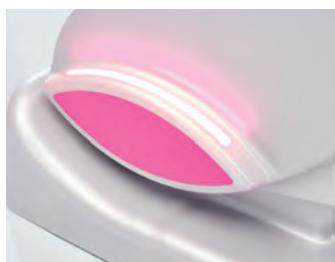

Modell nr. Beskrivelse

**101.0487.0 LED dekorlys**

LED dekorlys på begge sider over fargepanelet, valg av 13 forskjellige farger, utskiftbare takket være en bryter under fargepanelene, tone-i-tone fargenyanse allerede tilpasset valgt putefarge (hvit LED for brune, svarte og grå puter ).



**101.0488.0 Fargepanel**

med farge tilpasset fargen på stolpolstringer.



**101.0469.0 Legens fotstøtte**

LH-montering, pasientens POV.

**101.0468.0 Legens fotstøtte**

RH-montering, pasientens POV. (uten bilde)



**101.0466.0 Mobilitet**

2 svingbare tvillinghjul, Ø 75 mm, 4 faste hjul Ø 50 mm, elektrisk ledende, med sentrallås (ettermontering mulig).

**Merk:**

**Må ikke brukes til pasienttransport!**



Design: Rainer Schindhelm

## **arco proktologi**

– Undersøkelses- og behandlingsstol for proktologi

### **Utmerket design**

mest moderne teknologi og et sterkt forhold mellom pris og ytelse

### **Elektromotorisk nedfellbar seteseksjon**

### **Sikker posisjonering av pasienten**

med nedfellbar seteseksjon ved elektrisk utkobling

### **Elektromotorisk justering av Trendelenburg-posisjon og seteseksjon**

### **Ergonomisk ben- og fotstøttesystem**

med integrerte armstøtter for en avslappet og profesjonell undersøkelsesstilling

### **Variable innredningsmuligheter**

med et stort utvalg av tilbehør

### **Enkel å holde ren og hygienisk på grunn av glatte, lukkede overflater**

### **Opplyst display**

for å indikere alle stolfunksjoner

### **Elektronisk diagnosefunksjon**

1 ekstra programmerbar tast f.eks for utløsing av en kald lyskilde med integrerte stikkontakter. Lagring og visning av 8 minneposisjoner (behandlingsposisjoner/legens valg)

### **Myk oppstart av stoljusteringsbevegelser**

### **Kontroll av alle justeringer**

med fot- eller håndkontroll





## **arco proktologi**

– Undersøkelses- og behandlingsstol for proktologi

### **Teknologi og effektivitet**

En lav starthøyde, perfekt for å komme seg enkelt på. Forhåndsdefinerte og lagrede behandlingsposisjoner gir rask, effektiv håndtering.

### **Pasientens komfort og sikkerhet**

Den nedfellbare seteseksjonen gir optimal tilgang til pasienten og lar legen stille inn ønsket behandlingsposisjon. Elektrisk automatisk utkoblingsfunksjon under posisjonering støtter sikker pasientposisjonering.

### **Stort justerbart område**

Justering via elektromotorisk bekkenheving til sjokkstilling

### **Valg av benstøttesystemer**

- med fotstøtter 101.4560.1.
- med benstøtter av Göpel-type 101.4580.0.
- med Ergo-Steps 101.4570.0



## **arco proktologi** **Standard utstyr**

Ergonomisk polstring på sete, samt rygg- og hodestøtte. Fotstøttefester for rask fjerning eller individuelt svingbare på horisontalt nivå av fotstøtter eller Göpel-type benstøtter med integrerte håndtak. Oppbevaringsbrett med integrert uttrekkbar, pusskuff av SST 18/10, oppbevaringsplass for papirrull inntil 400 mm bredde, to integrerte stikkontakter, iht. til EN 60601-1, (aktivering av en stikkontakt med manuell kontrollenhet). Fotkontroll, bunnplate med 4 nivelleringsskruer, plastkledning, sølvgrå, søyle og ramme pulverlakkert i henhold til SCHMITZ fargekart. Polstring i henhold til SCHMITZ fargekart.

### **Viktig:**

Automatisk sikkerhetsstopp med nedfellbar seteseksjon i Trendelenburg-stilling.

### **Strømforsyning:**

3 m tilkoblingskabel med støpsel. Strømforsyning: 23 V, 5 Hz, 0,3 kW.  
Landsspesifikke versjoner tilgjengelig på forespørsel.

### **Vekt:**

Netto vekt:	ca. 121 kg
Sikker arbeidsbelastning:	180 kg

### **Pulverlakkert finish:**

Høykvalitets flerlags glanslakk med ekstrem motstand mot slag og riper. Enkel å rengjøre og desinfisere. Motstandsdyktig mot klimatiske forhold. Tilgjengelig i SCHMITZ-farger iht. til fargekart (uten pristillegg). Ytterligere valgfrie farger iht. til RAL fargekart mot ekstra betaling.

### **Polstringer:**






Høykvalitets, slitesterk skumgummi med polstring i kunstlær. Tilgjengelig i SCHMITZ-farger iht. til fargekart uten tillegg (klassiske og komfortegenskaper).

### **Ved bestilling:**

Vennligst oppgi følgende ved bestilling:

Fot-/benstøttesystem:	se side 120
Farge på polstring:	se fargekart side 148
Plast emaljebelegg for ramme:	se fargekart side 148
Modell nr.Beskrivelse	

Modell nr.	Beskrivelse
<b>100.0510.0</b>	<b>Ytterligere valgfrie farger iht. til RAL fargekart</b> Tilleggspris (uten bilde)

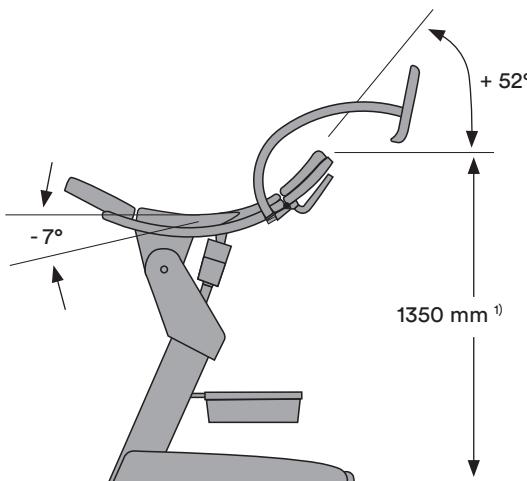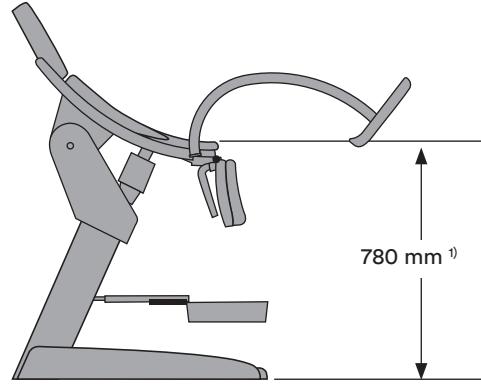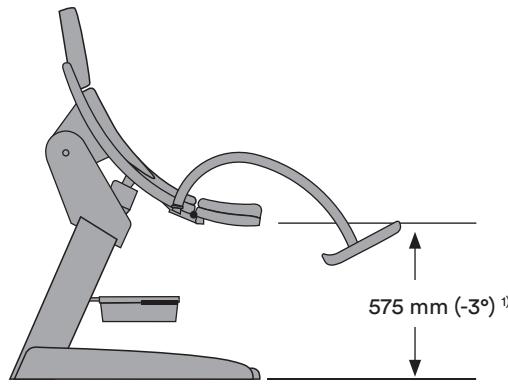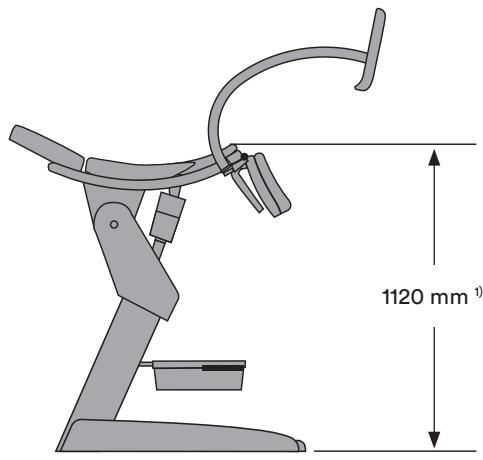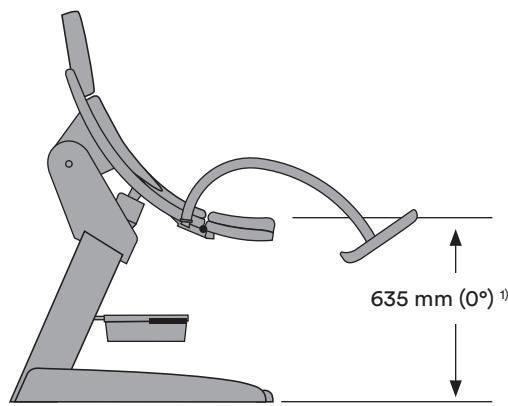

Design og dimensjoner kan endres.

<sup>1)</sup> I forbindelse med mobilitet 101.0223.0 legg til 75 mm.

## **arco proktologi** **Justeringsfunksjoner og dimensjoner**

### **Dimensjoner**

Sokkel	960 x 565 mm
Bredde på polstring seteseksjon	565 mm
Bredde på polstring ryggseksjon	opp til 695 mm



## **arco proctology** **Modelloversikt**

Modell nr.	Beskrivelse
<b>114.6600.1</b>	<b>Undersøkelses- og behandlingsstol</b> Elektromotorisk Trendelenburg-stilling og nedfellbar seteseksjon. Minnekontroll for 8 posisjoner. Aktivering av alle funksjoner ved hjelp av fot- og håndkontroll.

**Alle basismodeller er uten benposisjoneringssystem, velg mellom 3 alternativer! (side 120)**

---

*Oppdag arco for proktologi:*



## **arco proctology** Benstøttesystemer



Modell nr. Beskrivelse

---

**101.4560.1 Fotstøtte (par)**

med integrert, pulverlakkert håndtak, kan svinges og låses.  
Med ett par plastdeksler.

Vi anbefaler 101.4800.0 plastdeksel av gjennomsiktig PU-materiale som beskyttelse til fotstøttene.



---

**101.4580.0 Göpel benstøtte (par)**

med integrert, pulverlakkert håndtak, integrerte skumputer i sølvgrå, med stropper, rustfri stang 18/10.



---

**101.4570.0 Ergo-steps (par)**

Benstøttesystem med justerbare hæl-/leggstøtte, grå plast,  
kan svinges til siden, integrerte håndtak, sirkulært rør pulverlakkert i matchende farge med undersøkelsesstol.



---

**101.4850.0 Trekk i kunstlær (par)**

for håndtak (101.4560.1 og 101.4570.0) med glidelås, iht. til fargekart.



---

**101.4860.0 Trekk i kunstlær (par)**

for håndtak (101.4580.0), med glidelås, iht. til fargekart.



Modell nr. Beskrivelse

---

**101.0223.0 Mobilitet**

4 tvillinghjul, Ø 75 mm, låsbare og elektrisk ledende. (ettermontering mulig)

**Merk: må ikke brukes til pasienttransport!**



**101.3730.0 Hodepute**

inkl. borrelås, polstring i kunstlær iht. til fargekart.



**101.4800.1 Plastdeksler (par)**

av gjennomsiktig materiale, for å beskytte fotstøttene.



**100.1760.0 Papirrull**

400 mm bred, for plassering i det integrerte oppbevaringsrommet i ryggseksjonen med avtagbar polstring.



## Orbit

Det modulære forsynings- og avfallssystemet for gynekologi- og proktologi

### **Pasientkomfort kommer først**

Forvarmede instrumenter garanterer et høyt nivå av pasientkomfort. Forvarmingsteknologien utviklet av SCHMITZ muliggjør tilpasset temperaturjustering.

### **Mobilitet og fleksibilitet**

9 individuelle, mobile moduler, som kan ordnes og omorganiseres akkurat som du trenger dem. Tillegg og endringer i modulkonfigurasjonen kan gjøres når det er nødvendig. Modulene kan enkelt integreres selv i et eksisterende oppsett.



**Orbit** – Det modulære forsynings- og avfallssystemet for gynekologi- og proktologi



## Orbit

Orbit hjelper deg med å holde alt under kontroll.

### **Enkel rengjøring og desinfisering**

Avtakbare paneler og lukkede overflater muliggjør rask, fullstendig og enkel rengjøring – en ny standard innen hygiene.

### **Mobilitet og fleksibilitet**

100 % ubegrenset mobilitet er garantert – tilpasset dine daglige arbeidsflyter.

### **Orbit løser ditt avfallsproblem**


Spesialutstyrte moduler sikrer problemfri avhending av forurensede instrumenter og brukte materialer.



**Orbit** – Det modulære forsynings- og avfallssystemet for gynækologi- og proktologi




## **Orbit** **Dispenser- og avfallsmoduler, mobil**

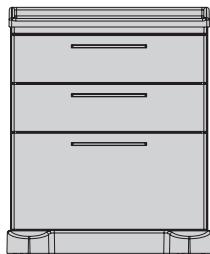

Modell nr.	Beskrivelse
<b>426.0010.0</b>	<b>Dispensermodul</b> mål: 625 × 760 × 530 mm (B × H × D) 2 skuffer Type 6 D, 1 skuff Type 6 G. Et forvarmeelement modellnr. 401.0401.1 (tilbehør) kan monteres i de to skuffene Type 6 D.



<b>426.0020.0</b>	<b>Dispensermodul</b> mål: 625 × 760 × 530 mm (B × H × D) 4 skuffer Type 6 D. Et forvarmeelement modellnr. 401.0401.1 (tilbehør) kan installeres i de to øverste skuffene Type 6 D.
-------------------	---

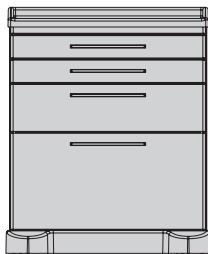

Modell nr. Beskrivelse

---

**426.0030.0 Dispensermodul**

mål: 625 × 760 × 530 mm (B × H × D) 2 skuffer Type 6 B, 1 skuff Type 6 D, 1 skuff Type 6 G.

Et forvarmeelement modellnr. 401.0401.1 (tilbehør) kan monteres i skuffen Type 6 D.




---


**426.0040.0 Dispenser- og avfallsmoduler**

dimensjoner: 625 × 760 × 530 mm (B × H × D) 1 skuff Type 6 B, 1 skuff Type 6 D, 1 avfallsskuff, elektromotorisk åpning ved å trykke på panelet, mekanisk lukking, med avgatbar SST-beholder, volum 12 l, (for 5 liter væske), plastkurv, rom til ca. 15 spekula, avfallsbeholder i plast, volum 8 l, pedal for sentrallås av hjul. Et forvarmeelement modellnr. 401.0401.1 (tilbehør) kan monteres i skuffen Type 6 D.


## **Orbit** **Dispenser- og avfallsmoduler, mobil**

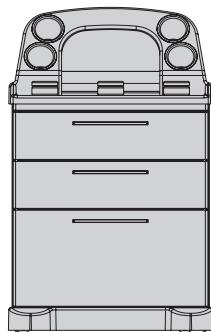


Modell nr.	Beskrivelse
<b>426.5010.0</b>	<b>Dispensermodul</b> mål: 625 × 995 × 530 mm (B × H × D) med formpresset topp av ABS, sølvgrå farge, med behandlingssett med plass til instrumenter, medisiner, engangsartikler etc., 2 skuffer Type 6 D, 1 skuff Type 6 G. Et forvarmeelement modellnr. 401.0401.1 (tilbehør) kan monteres i de to skuffene Type 6 D.

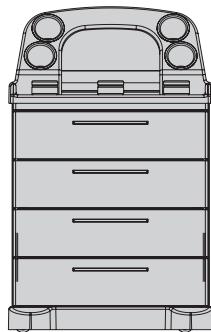

<b>426.5020.0</b>	<b>Dispensermodul</b> mål: 625 × 995 × 530 mm (B × H × D) med støpt topp laget av ABS, sølvgrå farge, med behandlingssett med plass til instrumenter, medisiner, engangsartikler etc., 4 skuffer Type 6 D. Et forvarmeelement modellnr. 401.0401.1 (tilbehør) kan installeres i de to øverste skuffene Type 6 D.
-------------------	---

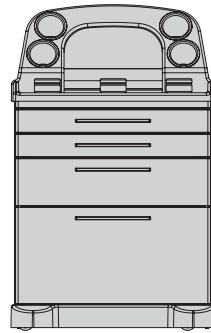

<b>426.5030.0</b>	<b>Dispensermodul</b> mål: 625 × 995 × 530 mm (B × H × D) med formpresset topp laget av ABS, sølvgrå farge, med behandlingssett med plass til instrumenter, medisiner, engangsartikler etc., 2 skuffer Type 6 B, 1 skuff Type 6 D, 1 skuff Type 6 G. Et forvarmeelement modellnr. 401.0401.1 (tilbehør) kan monteres i skuffen Type 6 D.
-------------------	--

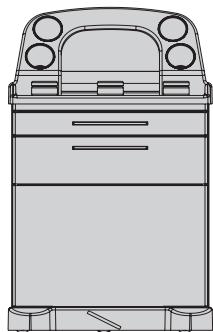


Modell nr. Beskrivelse

---

**426.5040.0 Dispenser- og avfallsmoduler**

mål: 625 × 995 × 530 mm (B × H × D) med støpt topp laget av ABS, sølvgrå farge, med behandlingssett med plass til instrumenter, medisiner, engangsartikler etc., 1 skuff Type 6 B, 1 skuff Type 6 D, 1 avfallsskuff, elektromotorisk åpning ved å trykke på panelet, mekanisk lukking, med avtagbar SST-beholder, volum 12 l, (for 5 liter væske), plastkurv for ca. 15 spekula og avfallsbeholder i plast, volum 8 l, pedal for sentrallås av hjul.

Et forvarmeelement modellnr. 401.0401.1 (tilbehør) kan monteres i skuffen Type 6 D.

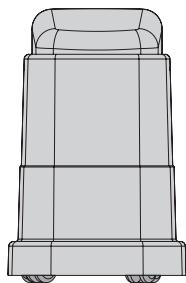

---

**427.0010.0 Avfallsmodul**

mål: 365 × 565 × 465 (B × H × D) Mobil, 4 stk. doble plasthjul diam. 50 mm, sensorlokk av plast, farge svart, kabinett av ABS, sølvgrå farge, avtakbar plastavfallsbeholder, 20 l hette.

---

**401.0801.0 Spesialfarge på kabinett i henhold til SCHMITZ fargekart, tillegg**




## Orbit


### Tilbehør til Dispenser- og avfallsmoduler



Modell nr.	Beskrivelse
<b>401.0401.1</b>	<p><b>Forvarmeelement</b></p> <p>i henhold til <i>Low Voltage Directive 2014/35/EU</i> for skuff Type 6 D. Innstilling og overvåking av temperatur via display, justerbar opp til maks. 40 °C /104 °F, for instrumenter (f.eks. spekula).</p> <p>Strømkilde 100 - 24 V, 50/6 Hz, gjennomsnittlig strømforbruk 20 Watt, kabel med støpsel, ca. 5 m lang.</p>
<b>401.0023.0</b>	<p><b>Holder for ultralydgel</b></p> <p>laget av SST, 320 × 165 mm (L x B).</p> <p>For oppvarming av ultralydgelgel i skuffen med forvarmeelement, egnet for opptil 4 flasker gel.</p>
<b>401.0450.0</b>	<p><b>Lokk</b></p> <p>325 × 265 mm, SST, for å dekke 12 l SST-beholder, under transport.</p> <p>(uten bilde)</p>
<b>401.0451.0</b>	<p><b>Lokk</b></p> <p>297 × 204 mm, laget av plast, for å dekke avfallsbeholder i plast, 18 eller 20 l, under transport.</p> <p>(uten bilde)</p>
<b>401.0460.0</b>	<p><b>Kurv</b></p> <p>SST med bærehåndtak, for 5 liter væske, for å romme ca. 15 spekula, for deponeringsmodul 427.0010.0.</p>

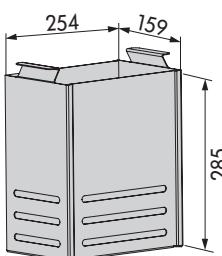

## **Orbit** Tilbehør til Dispenser- og avfallsmoduler

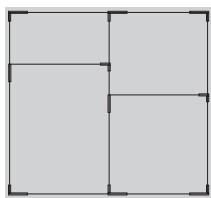

Modell nr.	Beskrivelse
<b>400.0505.0</b>	<b>Skuffeinnsats</b>
503 x 381 x 55 mm (B x D x H), to rader, for skuff Type 6 D, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 1 stk. langsgående skillevegg av SAN og 2 stk. sideskillere laget av SAN. (passer ikke i en skuff med integrert forvarming 401.0401.1!)	
<b>400.0506.0</b>	<b>Skuffeinnsats</b>
498 x 376 x 35 mm (B x D x H), to rader, for skuff Type 6 B, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 1 stk. langsgående skillevegg av SAN og 2 stk. sideskillere laget av SAN.	
<b>400.0507.0</b>	<b>Skuffeinnsats</b>
498 x 376 x 55 mm (B x D x H), tre rader, for skuff Type 6 D, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 2 stk. langsgående skillevegger laget av SAN. (passer ikke i en skuff med integrert forvarming 401.0401.1!)	
<b>400.0508.0</b>	<b>Skuffeinnsats</b>
498 x 376 x 35 mm (B x D x H), tre rader, for skuff Type 6 B, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 2 stk. langsgående skillevegger laget av SAN.	


**400.0505.0** **Skuffeinnsats**

503 x 381 x 55 mm (B x D x H), to rader, for skuff Type 6 D, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 1 stk. langsgående skillevegg av SAN og 2 stk. sideskillere laget av SAN.

(passer ikke i en skuff med integrert forvarming 401.0401.1!)


**400.0506.0** **Skuffeinnsats**

498 x 376 x 35 mm (B x D x H), to rader, for skuff Type 6 B, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 1 stk. langsgående skillevegg av SAN og 2 stk. sideskillere laget av SAN.

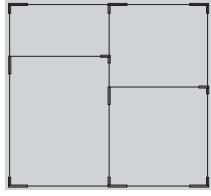
**400.0507.0** **Skuffeinnsats**

498 x 376 x 55 mm (B x D x H), tre rader, for skuff Type 6 D, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 2 stk. langsgående skillevegger laget av SAN.

(passer ikke i en skuff med integrert forvarming 401.0401.1!)

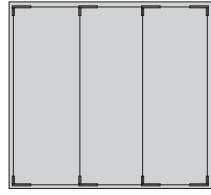**400.0508.0** **Skuffeinnsats**

498 x 376 x 35 mm (B x D x H), tre rader, for skuff Type 6 B, demontert, anodisert aluminiumsramme, bestående av: 2 stk. langsgående skillevegger laget av SAN.

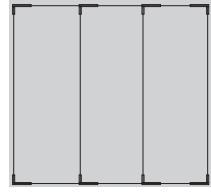



Modell nr. Beskrivelse

**401.0001.0 Sideskinne**

aluminium, 25 x 10 mm, med festestykker, sikker arbeidsbelastning opptil 20 kg.  
Effektiv bredde: 300 mm



**401.0002.0 Svingbart pussbrett, firkantet**

230 x 190 x 40 mm (B x D x H) 18/10 SST 18/10 med holder og plastskinneklemme.  
Effektiv bredde: 220 mm.



**401.0003.0 Svingbart pussbolle, rundt**

Ø 220 x 40 mm (diam. x H)  
18/10 SST 18/10 med holder og plastskinneklemme.  
Effektiv bredde: 220 mm.



**401.0004.0 Pussbrett**

355 x 320 x 65 mm (B x D x H)  
SST 18/10, med stålholder, plastbelagt hvit aluminium RAL 9006/SST 18/10.  
Effektiv bredde: 380 mm.



**401.0005.0 Festeholder**

290 x 215 x 25 mm (B x D x H)  
av stål, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), skinneklemme i plast, for plastbeholder 401.0006.0 og 401.0007.0.  
Effektiv bredde: 300 mm.

**401.0006.0 Plastbeholder**

225 x 300 x 130 mm (B x D x H) av polypropylen, med lukket lokk.

**401.0007.0 Plastbeholder**

225 x 300 x 130 mm (B x D x H) av polypropylen, med åpning i lokket. (uten bilde)

## **Orbit** Tilbehør til Dispenser- og avfallsmoduler



Modell nr.	Beskrivelse
<b>401.0008.0</b>	<b>12 l bøtte</b>
	Ø 310 × 270 mm (diam. x H)
	SST 18/10 skål med stålholder, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast.
	Effektiv bredde: 330 mm.



<b>401.0010.0</b>	<b>5 l pussbolle</b>
	Ø 330 × 140 mm (diam. x H)
	SST 18/10 bøtte med stålholder, pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinneklemme i plast.
	Effektiv bredde: 330 mm.



Modell nr. Beskrivelse

**401.0011.0 Avfallsposeholder**

265 × 205 × 425 mm (B x D x H)

wire Rilsan belagt, med plastlokk for 15 l avfallsposer, stålholder, pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006, plastskinneklemme, inkl. 1 rull med avfallsposer 401.0013.0.

Effektiv bredde: 300 mm.



**401.0012.0 Avfallsposeholder**

280 × 110 × 410 mm (B x D x H)

pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006) stålplate, med 2 plastskinneklemmer, for 15 l avfallsposer, inkl. 1 rull med avfallsposer 401.0013.0.

Effektiv bredde: 300 mm.

**401.0013.0 Rull med avfallsposer**

15 liter, i ruller, 48 stk, for 401.0011.0 og 401.0012.0.  
(uten bilde)



**401.0014.0 Avfallsbeholder**

420 × 175 × 410 mm (B x D x H)

pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stål, volum 18 liter, med 2 plastskinneklemmer. Utstikkende lokk kan åpnes med kne.

Effektiv bredde: 420 mm.

## **Orbit** Tilbehør til Dispenser- og avfallsmoduler



Modell nr.	Beskrivelse
<b>401.0015.0</b>	<b>Desinfeksjonsmiddel dispenser</b> Høydejusterbar, for montering av 500 ml beholder, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, hovedrør 500 mm i lengde og plastskinneklemme. Effektiv bredde: 100 mm.
<b>401.0016.0</b>	<b>Desinfeksjonsmiddel dispenser</b> Høydejusterbar, for montering av 1000 ml beholder, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate, hovedrør 500 mm i lengde og plastskinneklemme. Effektiv bredde: 100 mm.
<b>401.0017.0</b>	<b>Desinfeksjonsmiddel dispenser</b> For montering av 500 ml beholder, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate og plastskinneklemme. Effektiv bredde: 100 mm.
<b>401.0018.0</b>	<b>Desinfeksjonsmiddel dispenser</b> For montering av 1 000 ml beholder, med festeplate laget av pulverlakkert hvit aluminium RAL 9006 stålplate og plastskinneklemme. Effektiv bredde: 100 mm.





Modell nr. Beskrivelse

**401.0019.0 Dryppfanger**

Laget av SST 18/10,  
for 500 ml desinfeksjonsmiddel dispenser.

**401.0020.0 Dryppfanger**

Laget av SST 18/10,  
for 1000 ml desinfeksjonsmiddel dispenser.



**401.0021.0 Holder for hanskedispenser**

100 × 150 til 280 × 35 mm (B × D × H)  
justerbar, for alle vanlige engangshanskekartonger, laget av  
stål pulverlakkert hvit aluminium (RAL 9006), med skinne-  
klemme i plast.  
Effektiv bredde: 100 til ca. 165 mm avhengig av kartongstør-  
relsen.



**401.0022.0 Oppbevaringshylle**

400 × 500 × 25 mm (B × D × H)  
laget av plast, sølvgrå, nedfellbar,  
(2 sideskinner 401.0001.0 kreves).

Sikker arbeidsbelastning: 20 kg.



## Orbit

### Modell- og materialbeskrivelse



#### Kabinetter

Selvbærende konstruksjon laget av elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplater, sandwichkonstruksjon, utførelse i doble plater, enkel plate i bakpanel, lyddempet og termisk isolert høy stivhet, glatte indre og ytre overflater.



#### Skuffefronter

Utskiftbare frontpaneler av elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplater, med avrundede kanter, lyddempet og termisk isolert, rundtgående silikonforseglingsprofil.



#### Skuffer

Skuffer helt i elektrolytisk galvanisert og fosfatisert stålplater, pulverlakkert i hvit aluminium RAL 9006. Dekkede, lyddempede skuffeskinner med fullt uttrekk, automatisk inntrekkfunksjon og Airmatic støtdempersystem, høy holdekraft, fjerning av skuffer uten bruk av verktøy.  
Sikker arbeidsbelastning: 20 kg.

#### Innvendige skuffmål (brukbar størrelse B x H x D)

Type 6 B: 504 x 51 x 381 mm

Type 6 D: 504 x 126 x 381 mm

Type 6 G: 504 x 276 x 381 mm

## **Orbit** **Modell- og materialbeskrivelse**



### **Skuffehåndtak**

Halvsirkelformet eller kantet håndtak, laget av høytrykkspresset støpt sink, hullavstand 192 mm. Overflaten er motstandsdyktig mot kjemikalier, enkel å rengjøre og desinfisere. Skuffehåndtak matt forkrommet eller med polyester pulverlakk i samme farge som skuffefronten eller individuelt i henhold til SCHMITZ fargekart.



### **Hjul**

Moduler med 4 tvillinghjul Ø 50 mm, elektrisk ledende.  
Deksel på sokkel laget av ABS, sølvgrå farge.



### **Benkeplate**

Sømløs benkeplate av ABS, sølvgrå farge, ripebestandig og desinfeksjonssikker, profilkant på tre sider, forseglet bakside.



---

**Elektromotorisk åpning ved å trykke på panelet.**

Mekanisk lukking, med avtagbar 12 l SST-beholder (for 5 l væske) og plastsil.



---

**Innebygd varmeplate for forvarming av spekula.**

Temperaturinnstilling og overvåking via display, justerbar opp til maks. 40 °C / 104 °F.



---

**Avfallsmodul 427.0010.0**

Elektromotorisk åpning gjennom sensor teknologi.  
Avtagbar topp, avtagbar 20 l plastbeholder.

---

**Pulverlakkert finish**

Polyesterpulverlakk av høy kvalitet, med høygloss overflate, ekstremt støt- og ripebestandighet, lett å rengjøre, desinfeksjonssikker og klimabestandig.

**Standard farger på kabinett**

grå-hvit RAL 9002 eller hvit aluminium RAL 9006 eller grå aluminium RAL 9007.

**Spesialfarger på kabinett**

i henhold til SCHMITZ fargekart på side 148 mot et pristillegg.

**For skuffefronter og håndtak**

alle farger i henhold til SCHMITZ fargekart på side 148 er tilgjengelig uten tillegg. Ytterligere RAL-farger er tilgjengelig på forespørsel.



**Orbit** – Det modulære forsynings- og avfallssystemet for gynækologi- og proktologi



## Orbit – Eksempler på løsninger



### Illustrerte farger:

#### arco:

Polstring agavegrønn 109

Plastemaljebellegg hvit aluminium RAL 9006

Plastelementer sølvgrå

#### Arbeidssstol:

Polstring agave grønn 109

#### Orbit:

Chassis hvit aluminium RAL 9006



Frontpaneler bladgrønn RAL 1206050

Skuffhåntak halvsirkelformet sitrongrønn RAL 1008060

Plastelementer sølvgrå



## Orbit – Eksempler på løsninger

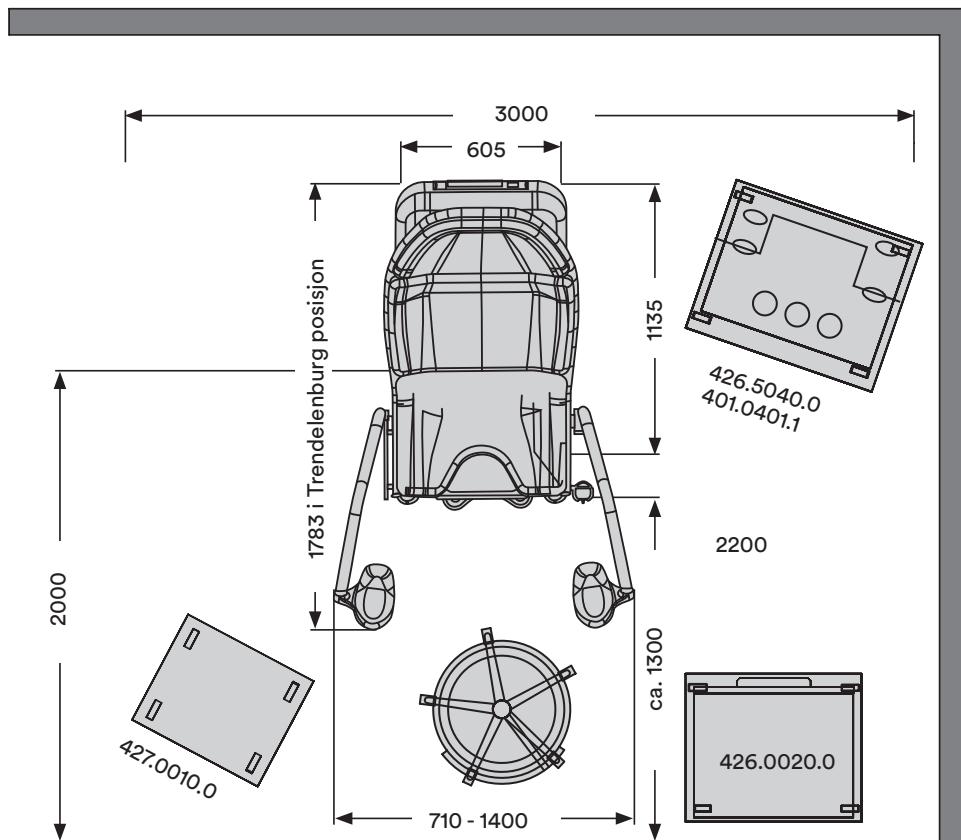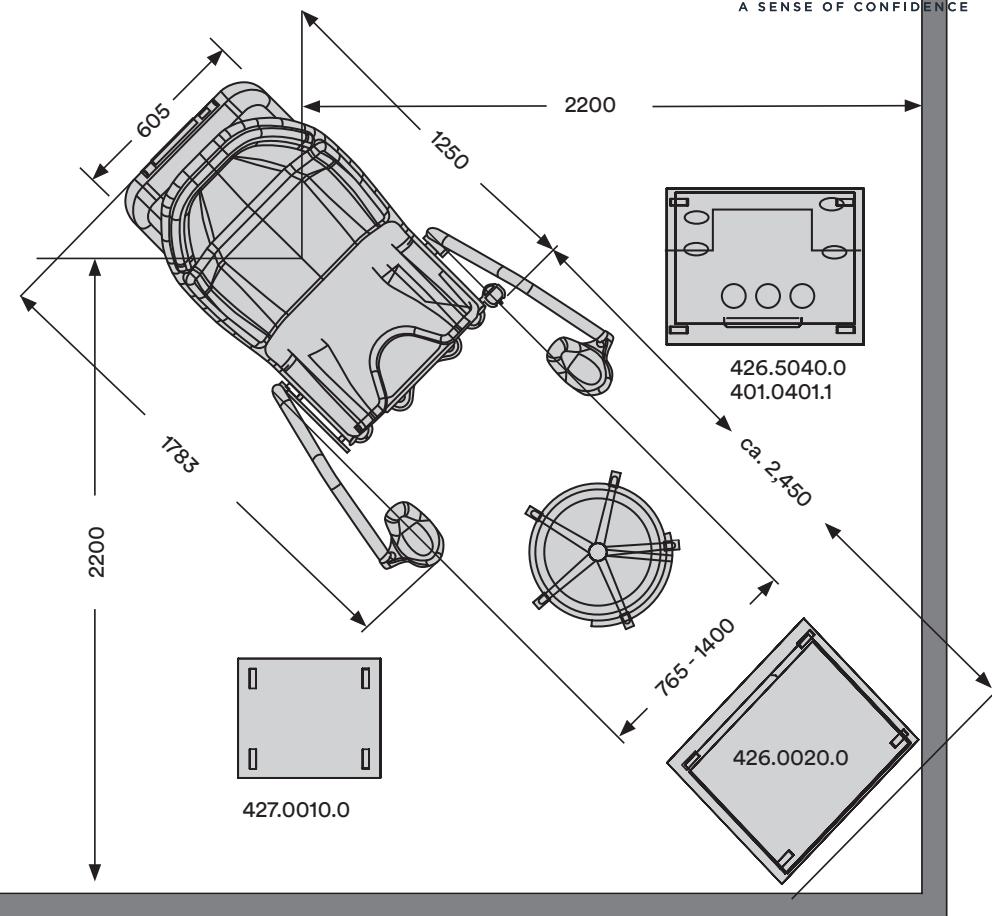

For stoler med jording, må kablene være innenfor rekkevidde (1135 x 605 mm) av gulvplassen som kreves.

Gynækologistolen kan plasseres og flyttes innenfor dette området.

# Fargekart

for pulverlakkering, polstringer,  
plastdeksler og arbeidsplatser



## Pulverlakkering

grå hvit RAL 9002	raps gul RAL 1009050*	lys grønn RAL 6027
hvit RAL 9010 	signal gul RAL 1003 	sitron grønn RAL 1008060* 
alabaster grå RAL 0007500*	pastel orange RAL 2003	blad grønn RAL 1206050* 
lys grå RAL 7035	lys elfenben RAL 1015	blå hvit RAL 2408015* 
antrasitt grå RAL 7016	ørken beige RAL 0607030*	lys blå RAL 2606030* 
sort RAL 9005	gammel rosa RAL 3014	safir blå RAL 5003 
hvit aluminium RAL 9006 	røsslyng lilla RAL 4003	Håndtak også tilgjengelig i forkrommet matt.
grå aluminium RAL 9007	sinoberrød RAL 2002 	Plastelementer sølv-grå

\* RAL fargenyanse



Antimikrobielt belegg  
Disse fargene leveres som antimikrobielle belegg

## Mange fagekombinasjoner

Du har et bredt utvalg for design av dine møbler og behandlingsstoler helt etter din egen smak. Med et utvalg på mer enn 40 farger og mange kombinasjonsmuligheter er det ingen ønsker som ikke kan oppfylles.

Enten dempet eller munter, klassisk eller moderne, elegant eller ekstravagant – du er garantert å finne matchende fargetoner i vårt sortiment.

Bruk ditt eget utvalg av farger for å oppnå en positiv effekt på pasientene dine. For å oppnå dette anbefaler vi, for eksempel, optimistisk rosa, stilig gult, beroligende blått eller avslappende grønt.

Vi vil med glede gi deg mer informasjon – ta gjerne kontakte med oss. Se baksiden for kontaktinformasjon.

## Antimikrobielt belegg

Pulverlakkering/epoxybelegg har antimikrobielt belegg.

Et antimikrobielt belegg sikrer effektiv og langvarig reduksjon av bakterie-, mugg- og soppkolonisering.

På grunn av det antimikrobielle belegget reduseres visse bakterier opp til 80% etter 15 minutter og opptil 99% innen de første to timene.

Det hemmer vekst av et bredt spekter av mikroorganismer:

- MRSA
- E. coli
- Salmonella
- Legionella
- Aspergillus Niger

Den anti-mikrobielle belegg har blitt testet i henhold til ISO 22196: 2011 for å underbygge reduksjon av mikrober. Bare belegg med en minimum reduksjon på 95 prosent er godkjent.


For ytterligere informasjon vennligst besøk [www.biocote.com](http://www.biocote.com).

Mikrober har svært lang stabilitet på ubehandlete flater:

## Mikrober har svært lang stabilitet på ubehandlete overflater:

Mikrobe	Varighet
MRSA	opp til 7 måneder
Salmonella	14 dager
Aspergillus niger	sporer overlever i flere år
E.coli	opp til 16 måneder


Den antimikrobielle sølvionteknologien reduserer veksten av mikrober opp til 99 prosent i løpet av de to første timene.

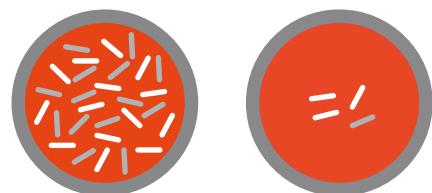

Uten antimikrobielt belegg

Med antimikrobielt belegg

### Prosentandel reduksjon av MRSA og E.coli på en beskyttet overflate (ISO 22196:2011)

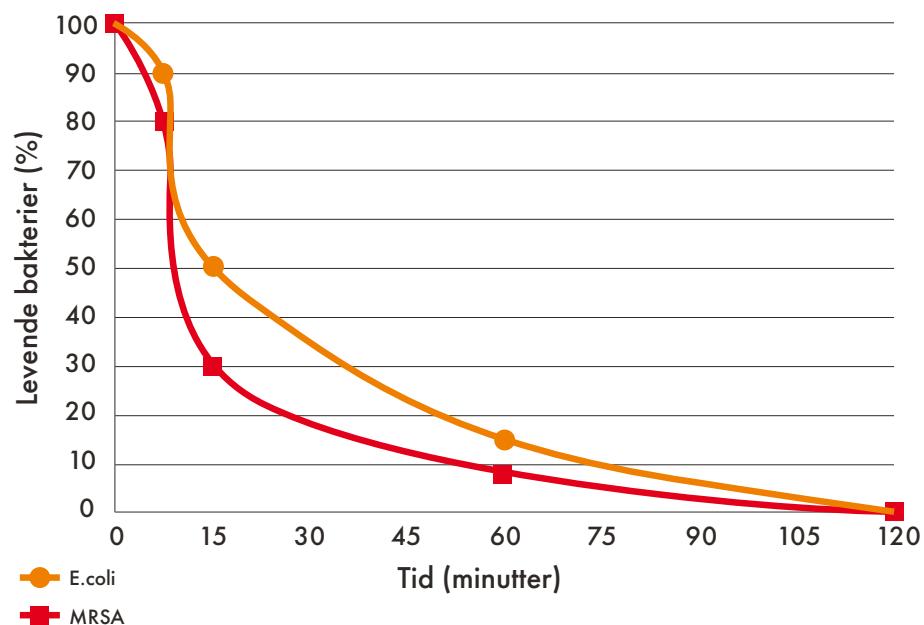

Oppdag vår nye produkt og fargekonfigurator



# Fargekart

for pulverlakkering, polstringer,  
plastdeksler og arbeidsplatte



## Kunstlær komfort



blomster hvit 84



agave grønn 94



gullgul 86



kaffe med melk 102




gulloransje 106



sand beige 101



karminrød 92

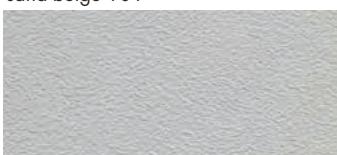

sten grå 96



bringebær rød 103




skifer grå 97




karibien blå 82



titan grå 91

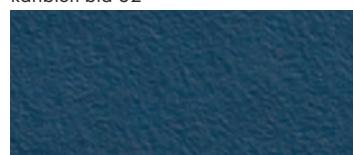

atlantet blå 83

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


lavendel lilla 107




isblå 108

## Kunstlær klassisk

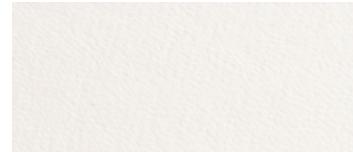

hvit 53

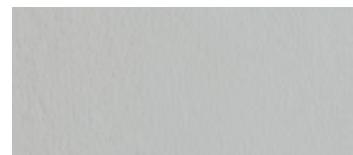

sølvgrå 55



havblå 52



sort 57

## Arbeidsplate



SolidColor lys grå 90



SolidColor basalt 95



Select hvit 65



Select manhattan 75



Select mørk antrasitt 80

## Plastelementer



sølvgrå

**Vi anbefaler:**

Spesialrens for kunstlær  
Artikkelnr. 2019878  
500 ml sprayflaske

**Rensesett for kunstlær**

Artikkelnr. 2026973  
1 x 500 ml sprayflaske med børste

Vennligst se vår egen bruksanvisningen for  
polstringer for detaljert informasjon om ren-  
gjøring og desinfeksjon av polstringer.

---

*Oppdag vår nye produkt og  
fargekonfigurator*



# Notater

# Notater

---

## KONTAKTINFORMASJON

### **svas svalland a.s**

telefon: 222 80 896  
epost: [firmapost@svas.no](mailto:firmapost@svas.no)  
webside: [www.svas.no](http://www.svas.no)  
Adresse: Mosseveien 199,  
N-1169 Oslo, Norge (Norway)

