

NIO

– For intraossøs tilgang



Når kvalitet teller

- Vaskulær tilgang på 10 sekunder
- Automatisk intraossøs for enkel vaskulær tilgang
- Steril og klar til bruk
- Lommeformat og lett – ca. 100 g
- Ingen ekstern strømkilde eller batteri
- Engangs – ingen vedlikehold kreves



[Februar 2022]

svas svalland as

Intraossøs tilgang




nio
A D U L T

nio
PEDIATRIC

Intraossøs tilgang



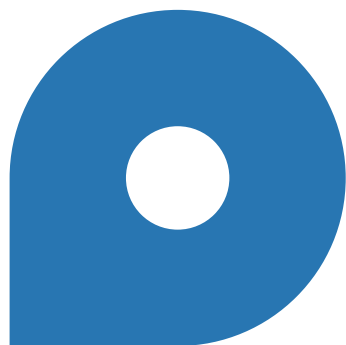

VOKSEN



PEDIATRISK


NIO – Den nye intraossøse tilgang

NIO er en enkel, automatisk intraossøs (IO) enhet, klar til bruk for trygg, rask og enkel vaskulær tilgang.


NIO brukes i nødssituasjoner, når vaskulær tilgang er nødvendig for væske- og legemiddeladministrasjon. NIO er liten, lett og enkel å bruke, selv i de mest krevende situasjonene.

NIO er designet for enkel injisering i alle kliniske settinger, i tibia eller humerus hos voksne, og i tibia hos barn.

- Steril
- Klar til bruk
- Brukervennlig
- Ingen eksponert nål
- Lommeformat og lett – ca. 100 g
- Ingen ekstern strømkilde eller batteri
- Vaskulær tilgang på 10 sekunder
- Engangs- og engangsbruk
- Ingen vedlikehold kreves
- Sikkerhetsfunksjoner
- 5 års holdbarhetstid
- Tilgangsområdet angitt med innføringspeker
- Justerbar penetrasjonsdybde i henhold til alder

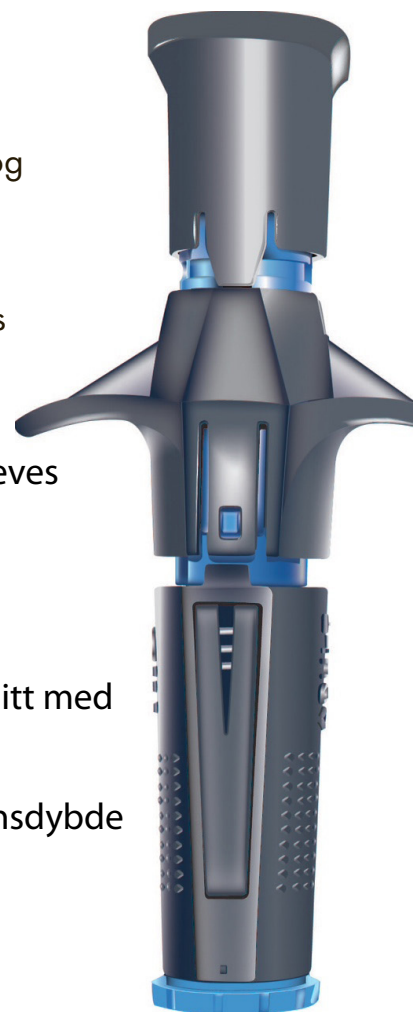


Prosedyretrinn:

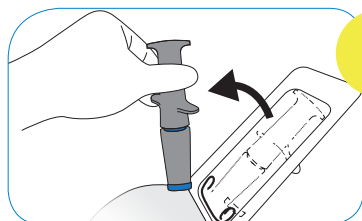

1

Åpne pakken og ta ut NIO.


Kontroller at NIO er fri for alle emballasjedeler.

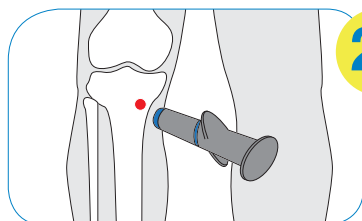

2A

Velg ett av følgende injeksjonssteder:


A. Primærsted for intraossøs injeksjon: Proximal tibia. Fra tuberositas tibiae – ca. 2 cm medalt og 1 cm proksimalt

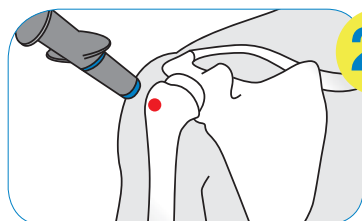

2B


B. Sekundærsted for intraossøs injeksjon: Humerus hode. Addukter armen. Plasser pasientens hånd på umbilicus. Finn store tuberkel på siden av humerus.

MERK: Følg prosedyren ved å immobilisere pasientens arm.

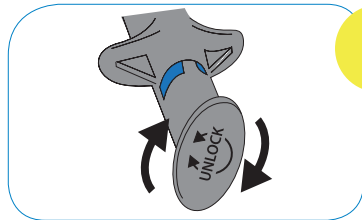


3

Lås opp NIO ved å dreie topplokket 90 grader i hvilken som helst retning.

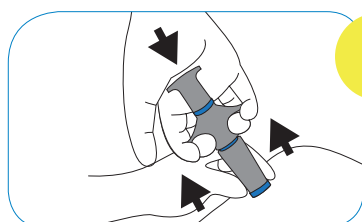


4

Plasser håndflaten på din dominerende hånd over toppen av enheten. Trykk enheten mot pasientens hud og opprett- holde trykket. Mens du trykker ned på enheten, trekker du uttrekksvingene oppover. Dette vil aktivere enheten.

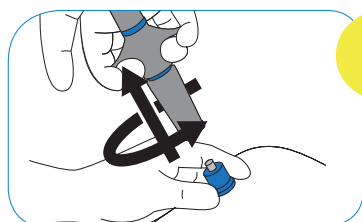

5

Trekk forsiktig NIO opp i en roterende bevegelse ved å holde bunnen av nålestabilisatoren mot infusjonsstedet.

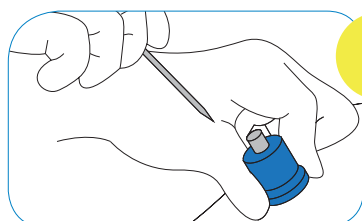

6

Fortsett å holde nålestabilisatoren på plass og dra opp nålen (det kan være nødvendig med vridning).

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

telefon: 222 80 896

epost: firmapost@svas.no

websiteside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2022 svas svalland as, Oslo, Norway.
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as